

1分钟的时间 能拿来做什么？

冲杯咖啡



换隐形眼镜



发封邮件



杀灭卡氏棘阿米巴*

*一种阿米巴原虫，常致角膜炎、脑炎。按照欧盟消毒剂上市要求试验本品可杀灭卡氏棘阿米巴。

用于眼科器械的高效泡沫消毒剂

雀艾斯达®眼科器械消毒液是一款便于使用的泡沫型消毒剂。
挤压、擦拭、等待、冲洗便可完成消毒。




挤压2泵剂量的消毒泡沫于干燥的擦拭巾上，或可直接挤压至器械表面



在器械表面涂抹开本品



至少确保1分钟的
作用时间

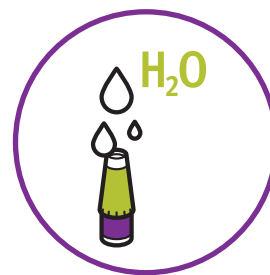

使用适当的水冲洗器械表面

Tristel Duo
OPH

雀艾斯达®眼科器械消毒液已通过国家卫生健康委卫生健康监督中心审核，备案为第一类消毒产品。

雀艾斯达®眼科器械消毒液在欧盟被列为IIa级消毒产品（根据CE标准93/42/EEC及2007/47/EC修订案）。

Tristel Duo®擦拭巾在欧盟被列为I类医疗器械（根据欧盟医疗器械标准MDR2017/745）。



可杀灭微生物种类

凭借雀艾斯达自主研发的二氧化氯技术, 本品可在1分钟杀灭多种微生物, 包括:

- 大肠杆菌
- 金黄色葡萄球菌
- 枯草杆菌黑色变种芽孢
- 卡氏棘阿米巴 (棘阿米巴角膜炎的致病原之一)
- 5型腺病毒
- 黄曲霉
- 黑曲霉
- 白色念珠菌
- 腐皮镰刀菌
- 金黄色葡萄球菌
- 铜绿假单胞菌
- 耐碳青霉烯类肠杆菌
- 耐万古霉素肠球菌

(以上测试均通过中国CMA检测。)

(以上测试均按照欧盟消毒剂上市要求试验。)



性价比高

可减少一次性医疗设备的使用, 节约支出。快速处理待消毒器械, 无需购置多套相同设备, 减少资本支出。



兼容性好

本品可在主流眼科器械厂家生产的产品上使用。包括:

- Accutome (Keeler)
- Clarity Medical Systems (Natus)
- DGH Technologies
- Ellex
- Haag-Streit
- Nidek
- Quantel Medical
- Reichert / Ametek
- Takagi
- Tomey



使用简单

本品使用方法简单。只需将本品挤压至干燥的擦拭巾上, 然后擦拭所需表面, 静待1分钟后用适当的水冲洗, 即可完成消毒。



快速

本品的单次消毒作用时间是1分钟。

二氧化氯灭菌原理

本品使用的二氧化氯(化学式: ClO_2) 为雀艾斯达一项自主研发的成果。二氧化氯的高水平消毒能力是被证实的。二氧化氯是强氧化剂, 它能氧化细菌及真菌细胞膜表面的脂类及蛋白质, 使细胞膜完整性丧失, 最终导致细胞死亡。二氧化氯也能渗透进细胞内, 通过氧化反应降解核酸。二氧化氯对病毒的灭活原理亦如此。生物体不会对二氧化氯产生耐药性, 因为二氧化氯是与生物硫醇*反应。

*一种抗氧化剂, 保护细胞免受氧化损伤。对所有活着的生物体中都起着非常重要的作用。

适用范围

用于眼科器械的高水平消毒。



诊断用接触镜



可重复使用的
眼压计棱镜



眼科超声诊断仪探头
(A超探头以及B超探头)



裂隙灯



角膜测厚仪

本品可配套使用Tristel Duo®擦拭巾。

Tristel Duo®擦拭巾为100%无纺布(聚丙烯材质, 18gsm), 已预先切割成合适的大小, 使用时不会从桶中掉落。

Tristel Duo®擦拭巾可以有效的将本品擦拭在器械表面。



Tristel Duo®擦拭巾

- 每筒200抽/每箱6筒

雀艾斯达®眼科器械消毒液

- 125ml基液(柠檬酸) + 125ml激活液(亚氯酸钠)

按压泵头, 可混合基液与激活液, 产生二氧化氯泡沫。

- 每瓶剂量310泵, 每箱6瓶。

DOK 壁挂架

- 旨在将OPH放在手边。
- 1个/套

