

# Tristel Clean 清洁泡沫

## 一款适用于医疗器械清洁的 三重含酶配方清洁泡沫

Tristel Clean 清洁泡沫适用于无管腔的浸入式和非浸入式医疗器械。

Tristel Clean 清洁泡沫可作为一款单独使用的清洁产品, 或在进行消毒前使用。

只有彻底清洁医疗器械, 消毒才会有效。

不论是单独使用或者是消毒前的清洁工作, 使用 Tristel Clean 清洁泡沫后均无需进行冲洗。



**Tristel**<sup>TM</sup>  
**Clean**

Tristel Clean 清洁泡沫便于携带、实用、兼容。



**三种酶**  
满足清洁标准



**持久**  
2年有效期



**便携**  
重量轻及实用



**兼容**  
已证实与主流制造商产品兼容



**实用**  
无需浸泡



**泡沫型**  
无气溶胶产生

**第一类医疗器械**  
根据欧盟2017/745号医疗器械法令归类

# Tristel Clean清洁泡沫易于使用、操作简单、擦拭使用及高水平消毒。



挤压两泵Tristel Clean清洁泡沫于干擦拭巾上。  
推荐使用Tristel Duo®擦拭巾。



将泡沫覆盖在整个器械表面并将污渍擦拭至肉眼可见的干净。  
如果污渍较重,可重复本操作步骤。  
注意:详细的清洗步骤请参考Tristel Clean清洁泡沫的产品说明书。



使用Tristel Duo®泡沫型消毒液进行高水平消毒。请参照产品使用说明书进行完整操作。

## 与主流器械厂家的兼容性

Tristel Clean清洁泡沫适用于使用Tristel Duo®泡沫型消毒液,雀艾斯达®眼科器械消毒液、雀艾斯达®超声探头消毒液、Fuse™内镜消毒液或雀艾斯达®消毒液对医疗器械进行消毒前在医疗器械上使用。它是一款可单独使用的清洁产品,如用于无危险性超声设备。

雀艾斯达®预清洗擦拭巾已使用Tristel Clean清洁泡沫的配方超过20年,并获得主流制造商的认可,如:

- Advanced Tactile Imaging, Inc.
- Arthrex
- ATMOS MedizinTechnik
- Becton Dickinson (Bard Access, CareFusion)
- BK Medical
- Butterfly Network
- Canon Medical Systems
- Carestream
- Clarius Mobile Health
- Clarus Medical
- DWL Compumedics
- Echosens
- Exact Imaging
- Fisher & Paykel
- Fujifilm (Fujinon)
- Fujifilm (Hitachi)
- FUJIFILM SonoSite
- GE Healthcare
- Haag-Streit
- Karl Storz
- Laborie (Cogentix Medical, MMS)
- Machida Endoscope Co.
- MCube
- Medcom
- Mindray
- Neoplas Tools
- Ocular Instruments Inc
- Optim LLC
- Orlvision
- Pentax
- Philips
- Polydiagnost
- Samsung Healthcare
- SapiMed
- Siemens Healthineers
- Southern Scientific / Care Wise
- tic Medizintechnik
- Unisensor
- Verathon
- XION Medical

### Tristel Duo®擦拭巾

每筒200抽/每箱6筒



### Tristel Clean清洁泡沫

每瓶剂量310泵,每箱6瓶

