


stellaTM

医疗器械去污简易化

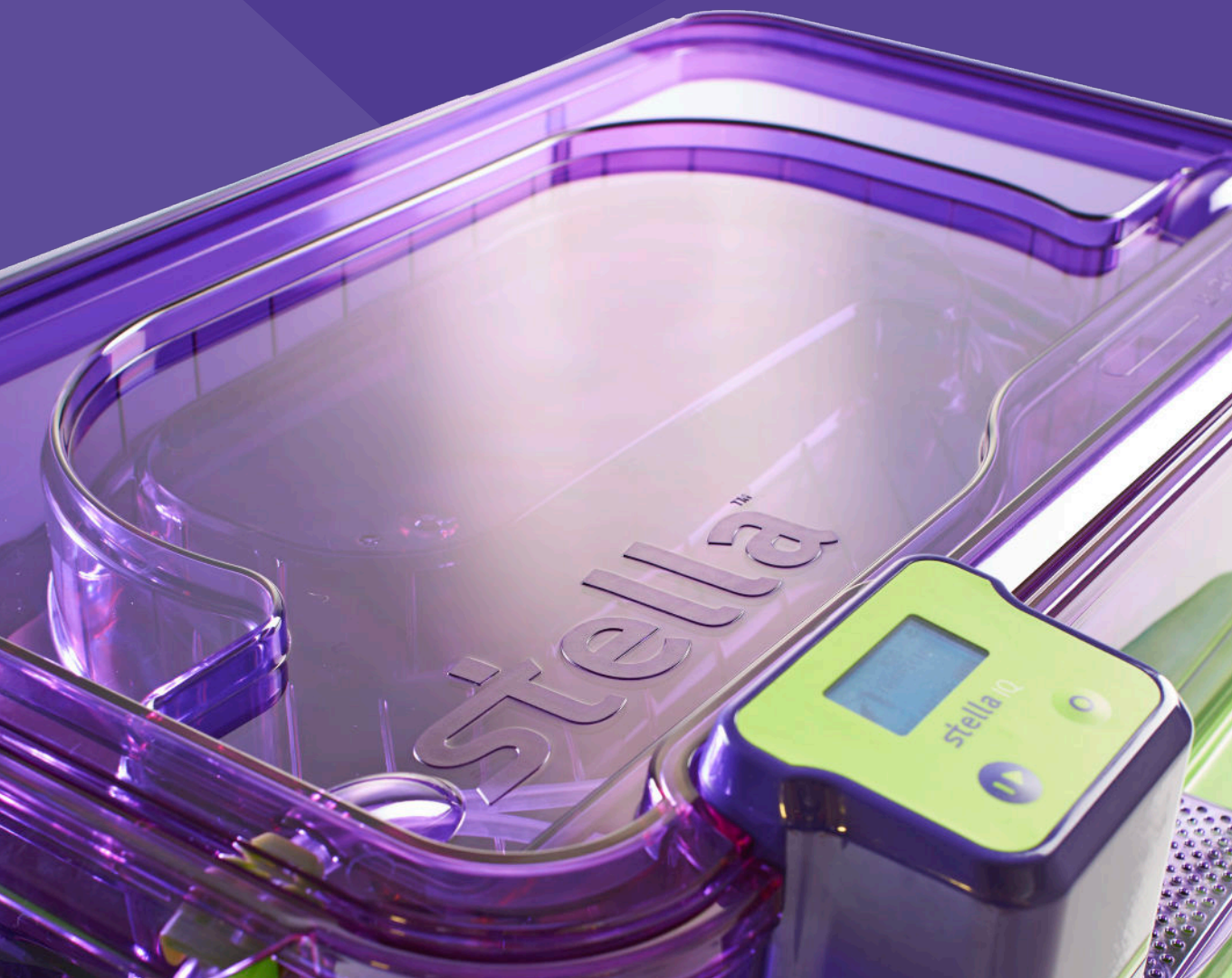

关于 STELLA

什么是 STELLA?

Stella 将简单的手工浸泡与复杂的全自动清洗整合在一起。适用于对热敏感的侵入式或非侵入式医疗器械的去污。包括膀胱镜、宫腔镜、支气管镜、插管内窥镜、鼻内镜、经食管超声心动图探头 (TOE/TEE)、非侵入性超声探头、经阴道和经直肠超声探头和喉镜。

喜欢 STELLA 的理由

- 1 去污变的简单:**预清洗后, 高水平消毒挤破 1 包装袋; 灭菌挤破 2 包装袋。
- 2 安心:**让智能技术引导您完成受控、有效和经验证的去污循环。
- 3 对使用者友好:**在使用时使用 CLP 法规归类为无害的化学品对您的医疗器械进行去污操作。
- 4 释放资金:**与全自动清洗消毒机相比, Stella 需要投入的资金最少。
- 5 设备周转速度快:**只需 5 分钟即可完成一次高水平消毒循环或是一次灭菌循环, 使用较少的医疗设备进行操作, 减少等待时间并看诊更多病患。
- 6 兼容性:**使用已获得全球制造商认可的解决方案。

一个系统 两种选择

Stella 能助您在 1 小时的时间,完成至少 5 个器械的去污。大幅降低设备使用、去污和贮存间的耗时。

STELLA 配置 A

适用于无管腔医疗器械。
循环时间 5 分钟。

STELLA 配置 B

适用于单管腔和无管腔医疗器械。
循环时间 5 分钟。




Stella 可让您在去污这件事上,花更少的时间,操作更少的医疗器械,看更多的患者。您可以释放资源并缩短等待名单,并节省不必要的资本设备投入。

可追溯性和数字化记录

成功完成一次循环后,Stella IQ 显示屏上将显示跟踪验证码及一个二维码。将此跟踪验证码记录在 Stella 《质量跟踪记录本》中,完成纸质化的可追溯性。二维码用于数字化记录。

特征

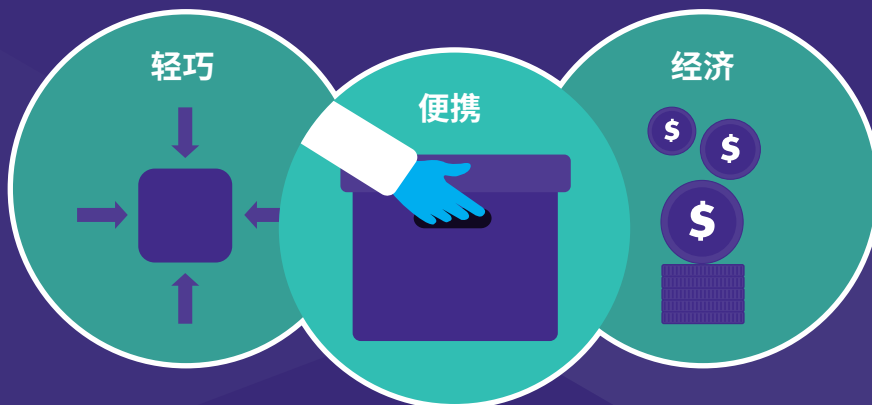

Stella 非常适合科室空间有限, 无资金投入用于昂贵设备的情况。Stella 的体积小、重量轻, 能够做到轻松运输和即时操作。您无需浪费时间在部门间运送医疗器械或送去医院消毒供应中心。您只需要一个平面, 例如长凳上或手推车上和一个水槽。

STELLA 配置 A


70cm x 46cm x 23cm
(高度可能会有轻微变化)

STELLA 配置 B

82cm x 46cm x 23cm
(高度可能会有轻微变化)

Stella IQ 和 Pulse 由电池供电, 充满一次电可完成 60 到 80 次循环。与全自动洗消机相比, 您可以节省大量能源和水的成本。


智能设计

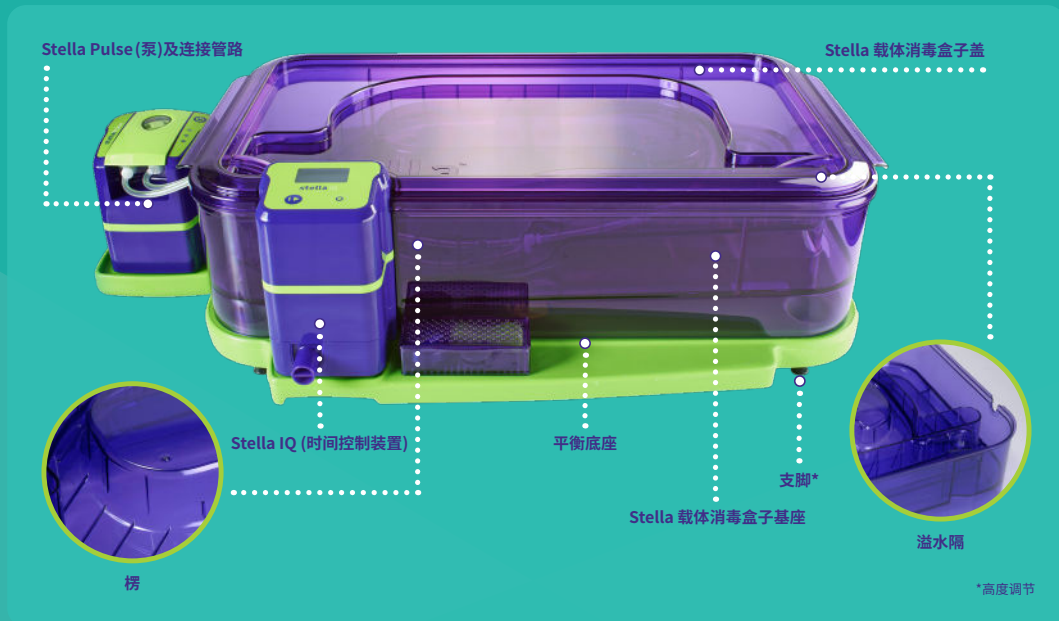

Stella 载体消毒盒子基座和盖子经过专门设计,可确保您的医疗器械可完全被溶液浸没,确保全面覆盖。Stella 载体消毒盒子盖的形状与基座内部形状匹配。将盖子置于基座上方时,多余的溶液会溢出到溢水隔中,并自动排出。基座内的凹槽用于放置医疗器械。基座底部的楞可抬高医疗器械,保证所有表面都能与溶液接触。

智慧技术

Stella IQ 和 Pulse 是 Stella 的大脑和心脏, 通过蓝牙协同工作, 提供受控、高效和验证的去污循环。Stella IQ 通过数字显示屏指导您完成每个步骤, 以实现对单管腔医疗器械高效且无误的去污循环。Stella Pulse 将消毒液泵入器械的内腔, 不会留下任何未经处理的表面。

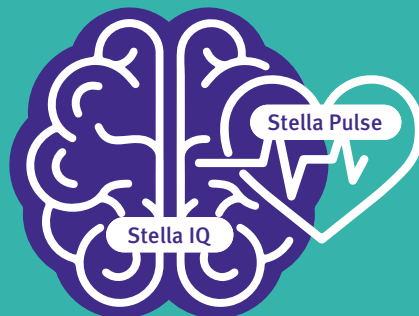

3



4




5

- 1 提示您放入器械, 往 Stella 中倒入雀艾斯达化学品。
- 2 验证 Tristel Fuse 消毒液已添加。
- 3 验证器械已正确与 Pulse 连接, 并检测循环过程中的任何障碍物或脱落。
- 4 启动 5 分钟作用时间倒计时, 并在循环完成后自动排出废液。
- 5 冲洗器械腔道, 去除污物及生物负荷, 同时监测及调整液体压力, 保护器械。
- 6 在每个成功的循环结束后, 会生成一个唯一的跟踪验证码, 作为可供下载的记录被保存, 用于后续追溯。

ClO₂ 的力量

雀艾斯达的二氧化氯 (ClO₂) 化学

Tristel Fuse是专用在Stella上的一款高水平消毒液或灭菌剂。他基于自主研发的ClO₂配方，该配方在世界各地使用和被信赖。Tristel Fuse是二元包装设计，2个各自分离的密封空间内装有雀艾斯达基液和激活液。通过挤压进行混合时，生成二氧化氯。雀艾斯达ClO₂是一款强大的杀菌剂，经证实可杀灭细菌、病毒、原生动物、酵母、分枝杆菌和芽孢等多种微生物。

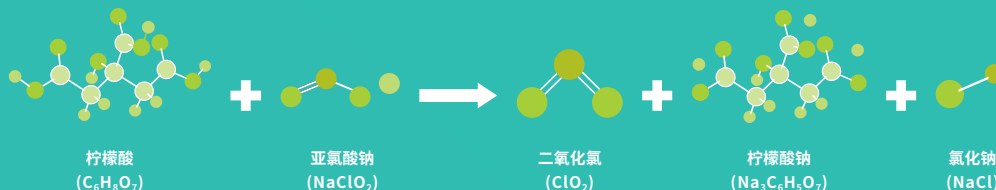

清洁的重要性

只有当医疗器械经过彻底清洁后，去污循环才是有效的。Tristel Clean for Stella器械清洗液是一款不含酶的清洁剂，用于使用Stella进行循环前的手动清洗。快速及高效地分解有机物及蛋白质。当将Tristel Clean用于Stella时，使用Tristel Clean for Stella器械清洗液做清洁，使用Tristel Fuse进行高水平消毒时，中间无需冲洗。

您知道吗？

雀艾斯达ClO₂化学出现在多份指南中关于处理中度危险性医疗器械的指引。

如何使用 STELLA



开启 Stella IQ。



若使用 Stella 配置 B, 开启 Pulse。



将器械放入基座。



将 5L 工作液倒入基座。



盖上盖子, 开启完整的循环。



记录唯一的跟踪验证码用于追溯。

完整的指引, 请参阅 Stella 说明书及操作指南挂图。

● STELLA 配置 A

● STELLA 配置 B

为了使事情更简单, 使用 Tristel Fuse 时不需要做冲洗。
消毒液不会在器械上留下任何有毒或有害残留物,
因此不需要消毒后的冲洗步骤。告别无菌水, 避免与
水污染有关的任何风险。

您知道吗?

Stella 于 2008 年被开发出来, 已是一项值得信赖的技术。它已在超过 27 个国家使用。

TRISTEL FUSE

喜欢 TRISTEL FUSE 的理由

Tristel Fuse 易于准备和使用。只需挤破包装袋，将其内容物倒入 5 升水中，然后倒入 Stella 基座中。得益于短作用时间，Tristel Fuse 可帮您节省时间。经验证，可在 5 分钟杀灭枯草芽孢杆菌、分枝杆菌 (TB)、腺病毒、脊髓灰质炎病毒、肺炎克雷伯菌、鼠诺如病毒、万古霉素耐药屎肠球菌和铜绿假单胞菌*。

- **无误差：**一个浓度，一个作用时间。
- **无微生物耐药性：**微生物不能对雀艾斯达 ClO_2 产生抗性。
- **无危险副产物：**根据 CLP 法规，工作液未被归类为危险化学品。

*除枯草芽孢杆菌外，其它微生物均在海外验证。

用于高水平消毒：



用于灭菌：



与医疗器械的兼容性

Tristel Fuse 已经过测试并确认与全世界制造商的设备兼容，包括 BK Medical、佳能医疗系统、锐珂医疗、富士胶片 (日立)、卡尔史托斯、飞利浦、三星医疗保健和 Laborie。

完整的 Tristel Fuse 设备兼容性记录，请联系 devices@tristel.com。



制造商: Tristel Solutions Limited,
Lynx Business Park, Cambs, UK, CB8 7NY
电话 +44 (0) 1638 721500 - **邮箱** mail@tristel.com - **网站** www.tristel.com

在华责任单位: 雀艾斯达医疗器械(上海)有限公司
上海市黄浦区淡水路277号二层203室
电话 +86 (21) 8016 2555 - **邮箱** 888@tristel.com

如需更多 Tristel 专利信息, 请访问: <http://www.our-patents.info/tristel>
Copyright © Tristel Solutions - Mkt-Bro-2196-1 - 06/JUN/2023

