



医疗保健领域的数字化可追溯性

3T 平台

3T 现已发展成为一个功能齐全的合规管理云平台,可为纸质审计追溯手册提供替代方案。

3T 将医疗护理点的直观移动应用程序与交互式网络门户相结合,即可为用户提供极具价值的去污合规管理工具。


3T 将指导用户完成所有流程步骤,从而实现去污事件追溯,并确保其所在组织的各个部门均可实时查看该等事件。由此,管理员和去污负责人将可确保用户不仅能够按照适当间隔进行去污,并且每次去污均可遵循准确流程。

所有去污事件的汇总数据均安全存储在云端,并可通过网络门户随时进行查看。管理员可通过交互式仪表板对报告进行查看和定制,以协助各个部门保持较高质量标准 and 效率水平。






示例:记录

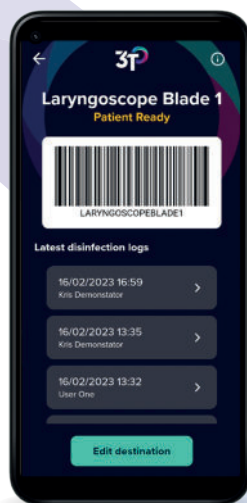

示例:检查

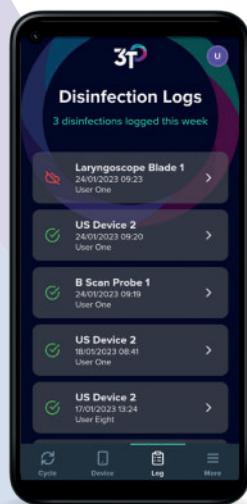

示例:审核

数字化可追溯性流程

追溯 - 记录去污事件

仅需扫描支持 3T 的 Tristel 产品,并创建唯一合规管理记录,即可使用直观的 3T 移动应用程序,从而轻松有效地实现去污事件追溯。

检查 - 医疗器械状态

非常适合抽查或正式审计组织内医疗器械的去污状态。用户可通过 3T 快速扫描或搜索想要检查的器械,然后显示其当前状态和最新去污事件。

审核 - 去污事件

3T 可确保用户能够使用移动应用程序或网络门户,并通过消毒日志查看已完成的去污事件;且可对该日志进行搜索和/或筛选,以提供定制视图,从而确保用户能够根据需要进行数据分析。




特点

管理

3T 通过交互式网络门户,为组织管理员提供自主权,确保其能够轻松快速进行平台设置和维护,以满足当前和未来需求。

由于所有门户元素均基于云,因此无需额外安装软件即可在任何地方实现安全访问。

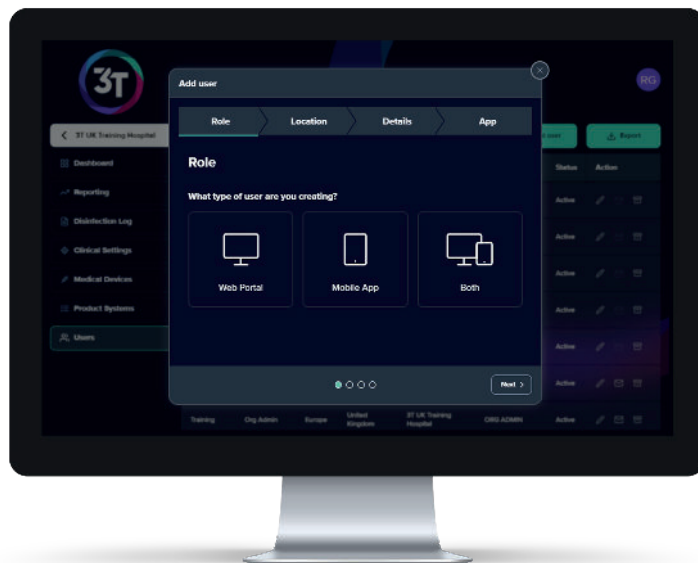

✓ 用户

由于管理员能够自行进行操作,因此可轻松完成团队成员管理和新用户添加/引入。

✓ 用户

添加/编辑并对组织内 3T 正在处理的所有医疗器械的位置进行管理。可将器械 ID 转换为二维码,用于进行‘快速启动’扫描。

✓ 用户

可根据临床科室列表对组织进行配置,并将医疗器械分配到每个临床科室,以针对每个临床环境进行细分和监控。

✓ 用户

既可使用标配 Tristel 产品系统,亦可根据自身医疗器械的去污要求创建全套定制系统。



✓ 快速统计信息

用于查看与组织及其对 3T 整体使用情况相关的键信息快照。

✓ 使用情况图表

用于监测相关医疗器械、消毒周期及 3T 捕获的其他数据的趋势。

✓ 审计日志

用于监控平台的使用情况，其中记录了组织中发生的所有 3T 活动（包括对去污记录、用户和器械所做的变更）。

✓ 详细数据

当快速统计信息或使用情况图表均不够详细时，管理员可根据需要通过此项功能更加深入地了解数据。



仪表盘

用户在 3T 中生成的数据主要用于记录去污周期，是医疗保健服务提供者的宝贵资产。

其旨在为关键利益相关者提供一种以友好有效的方式将用户交互及其对产品、医疗器械和临床环境的使用可视化的方法。



扫描

为了以人性化方式平衡速度与准度, 3T 已最大限度减少数据记录所需步骤和手动操作。该移动应用程序遵循‘扫描优先’原则, 确保用户能够快速追溯初始登录权限、医疗器械和 Tristel 产品数据等各个流程。

✓ 组织连接

当对拟使用 3T 的新手机进行设置时, 仅需扫描 3T 网络门户中提供的二维码, 即可在数秒内将其与您所在的组织连接。

✓ 器械选择



存在多套相同器械的快节奏临床环境中, 仅需扫描器械的二维码或使用智能搜索功能在开始去污周期之前进行查找, 即可选择需要的医疗器械。

✓ 用户登录

为了便于访问, 用户可扫描其员工二维码/条形码, 即可在该移动应用程序中进行识别。仅需输入一个 4 位数的个人识别码 (PIN 码), 即可完成登录。

✓ 产品数据

这是每个去污流程中使用最广泛和最省时的一项功能。每次对支持 3T 的 Tristel 产品进行扫描时, 均将记录与事件相关的所有数据。此项功能将确保每个医疗器械均使用了正确产品, 且在其有效期限内 (如果检测到问题, 则会向用户发出警告)。

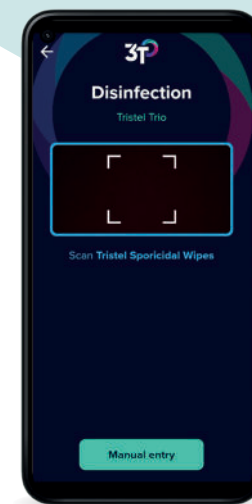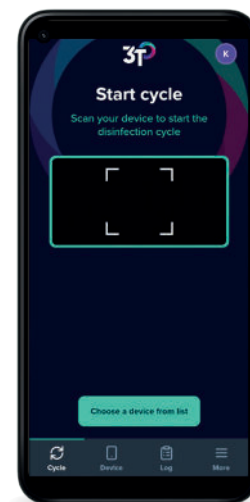



本地化

Tristel 产品在全球范围内得到了广泛认可和使用,而 3T 在进行开发时同样参考了相关区域法规,并允许进行整体定制。

✓ 语言

为了确保该平台便于每位用户使用,网络门户和移动应用程序的各个区域均在用户端进行了翻译。因此,每位用户均可在其个人资料中设置首选语言并将其保存,以备将来使用。

✓ 服务器

为了提供最高水平的服务,3T 在全球范围内拥有众多云服务器,以确保可将数据存储在受到适当监管的区域,且平台速度能够得到优化并保持一致。

✓ 产品使用

为了协助用户以合规方式(在组织、国家或区域层面)使用 Tristel 产品,可对具体元素(例如,联系时间)轻松进行定制,以确保用户对移动应用程序的使用符合最佳做法/具体标准操作规程。



如有任何疑问,
请立即通过Tristel销售团队或以下方式与我们联系:

✉ 3t@tristel.com

如需了解更多信息, 请扫描以下二维码



3t.tristel.com