

一款专注于超声设备 全方位高水平消毒的产品, 并可杀灭人乳头瘤病毒(HPV)



人乳头瘤病毒 (HPV) 现已被发现拥有 200 多种类型。16型和18型已证实为引起70%子宫颈癌症的源头。Meyers教授的研究证实雀艾斯达®超声探头消毒液可以在30秒灭活附着于超声探头上的HPV 16型和18型病毒。

雀艾斯达®超声探头消毒液是一款专门用于腔内超声探头的高水平消毒液。此外,雀艾斯达®超声探头消毒液还能对皮肤表面探头 (包括介入性操作过程中使用的探头)、探头支架、导线、插头、键盘、显示器, 甚至将超声探头与智能设备结合在一起的移动医疗设备上进行高水平消毒。

雀艾斯达®超声探头消毒液易于使用。
只需要简单地挤压、擦拭及等待!



按压两泵消毒液到干擦拭巾上
(建议使用 Tristel Duo®擦拭巾)



在超声探头和相关零件的表面涂抹开
消毒泡沫,并确保所有区域已被覆盖



让表面自然晾干,
保证作用时间不少于1分钟

Tristel DuoTM
ULT

雀艾斯达®超声探头消毒液已通过国家卫生健康委卫生监督中心审核,备案为第一类消毒产品。

雀艾斯达®超声探头消毒液在欧盟被列为IIb级医疗器械(根据CE标准93/42/EEC及2007/47/EC修订案)。

Tristel Duo®擦拭巾在欧盟被列为I类医疗器械(根据欧盟医疗器械标准MDR2017/745)。



高效

雀艾斯达®超声探头消毒液根据《消毒技术规范》2002年版-2.1.1.7.4, 2.1.1.9, 2.1.2.2的规定, 通过中国CMA检测可有效杀灭芽孢, 作用时间1分钟。经欧洲测试可杀灭芽孢、分枝杆菌、病毒、真菌和细菌。

- 大肠杆菌
- 金黄色葡萄球菌
- 铜绿假单胞菌
- 白色念珠菌
- 枯草杆菌黑色变种芽孢
- (以上测试均通过中国CMA检测。)
- 枯草芽孢杆菌
- 分枝杆菌
- 人乳头瘤病毒HPV
- 乙肝病毒
- 人类免疫缺陷病毒HIV
- 单纯疱疹病毒1型
- 黑曲霉
- 白色念珠菌
- 大肠杆菌
- 淋病奈瑟球菌
- 金黄色葡萄球菌
- 阴道加德纳菌
- 无乳链球菌
- 耐碳青霉烯类肠杆菌科(CRE)肺炎克雷伯氏菌
- 耐万古霉素肠球菌(VRE)
- 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌
- (以上测试均按照欧盟消毒剂上市要求试验。)



简单

培训和认证是雀艾斯达客户服务的重要组成部分。我们的线上培训站点可随时随地为使用雀艾斯达®超声探头消毒液的客户提供培训。



经济

雀艾斯达®超声探头消毒液无需投入额外资金购置昂贵器材或相关服务。仅需一条干擦拭巾, 两泵消毒泡沫, 即可实现高水平消毒。



便携

雀艾斯达®超声探头消毒液在需要时可以随处使用, 无需担忧像自动化消毒系统一样受环境所限。

不仅是医院, 雀艾斯达®超声探头消毒液在水电设施不完善的偏远地区也可随处使用。




兼容

经检测确认, 雀艾斯达®超声探头消毒液能与各大制造商产品良好兼容, 包括:

- Alpinion Medical
- BD (Bard Access)
- BK Medical
- Butterfly Network
- Canon Medical Systems
- Carestream
- Esaote
- Exact Imaging
- FUJIFILM Healthcare
- GE Healthcare
- Healcerion
- KOELIS
- MCube
- Mindray
- MobileODT
- Philips
- Quantel Medical
- Samsung Healthcare
- Siemens Healthineers
- Sonoscape
- Supersonic Imagine
- Verathon

适用范围

雀艾斯达®超声探头消毒液是一款专注于对超声探头所有部分进行全方位高水平消毒的产品, 亦是目前市面上少见的能随可移动设备移动的高水平消毒产品。

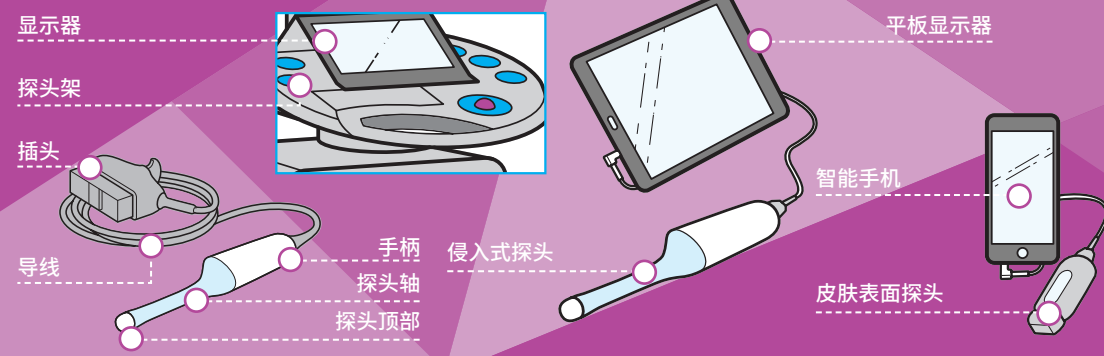

雀艾斯达® 超声探头消毒液

可有效杀灭
超声设备上的
HPV病毒

了解更多:
BIT.LY/HPVARTICLE

*Meyers, C., Milici, J., Robison, R. (2020) "The Ability of Two Chlorine Dioxide Chemistries to Inactivate Human Papillomavirus-contaminated Endocavitary Ultrasound Probes and Nasendoscopes" DOI: 10.1002/jmv.25666.

本品可配套使用 Tristel Duo®擦拭巾。

Tristel Duo®擦拭巾为100%无纺布(聚丙烯材质, 18gsm), 已预先切割成合适的大小, 使用时不会从桶中掉落。

Tristel Duo®擦拭巾可以有效的将本品擦拭在器械表面。



Tristel Duo®擦拭巾

- 每筒200抽/每箱6筒

雀艾斯达®超声探头消毒液

- 125mL基液(柠檬酸)+125mL激活液(亚氯酸钠)
- 按压泵头, 可混合基液与激活液, 产生二氧化氯泡沫。
- 每瓶剂量310泵, 每箱6瓶。

DOK壁挂架

- 旨在将雀艾斯达®超声探头消毒液放在手边。
- 1个/套

