

雀艾斯达®消毒液 — Trio擦拭巾系统

全球多国获批、认证、使用的高水平消毒 擦拭巾系统

适用于热敏无管腔的医疗器械的
高水平消毒, 包括:

- 鼻内镜
- 经阴道和经直肠超声探头
- 经食道超声心动图 (TOE) 探头
- 喉镜
- 测压导管
- 眼科器械



雀艾斯达®消毒液在中国卫健委备案为第一类消毒产品。

雀艾斯达®消毒液 — Trio擦拭巾系统用法简单!



清洁 预清洗擦拭巾

一张无纺布,
三重含酶清洁及表面活性剂,
给予器械表面彻底的预清洗,
有效去除杂质和有机物。



高水平消毒 杀芽孢擦拭巾及泡沫激活剂

两者混合揉搓15秒后生成二氧化氯,
一种高效的杀菌剂,
可在30秒内杀灭医疗设备
表面的细菌、病毒、真菌、
分枝杆菌和芽孢。



冲洗 冲洗擦拭巾

无菌包装内有一张无纺布,
浸有去离子水,
且含低剂量抗氧化剂;
用于去除表面残留物。



追踪 3T智能跟踪设备及 Trio质量跟踪记录本

通过一个简单的注册就能为
全部去污步骤做记录, 包括
负责人的验证。

Tristel TrioTM
Wipes System

CE ☒ 预清洗擦拭巾
I类医疗器械

CE ☒ 杀芽孢擦拭巾
IIb类医疗器械
2797

CE 2797 泡沫激活液
IIb医疗器械

CE ☒ 2797 冲洗擦拭巾
I类无菌器械

STERILE R



高效及快速

雀艾斯达®消毒液被证实可在**30秒**的时间内达到高水平消毒的要求。整个去污流程,包括记录时间,只需数分钟。



便携

雀艾斯达®消毒液是一款可移动解决方案,可在门诊及去污室使用。它的便携性消除了设备必须送去灭菌室集中处理的限制,节省了宝贵的时间。



智能追踪

雀艾斯达®消毒液提供2种追溯方式:纸质的质量跟踪记录本及3T智能跟踪设备。记录本使用纸笔记录每次去污事件,3T则使追溯更高效、精确及智能化。



性价比

无需设备投入及维修成本。



兼容

雀艾斯达®消毒液经兼容性测试与30多家制造商的设备兼容,包括:

- Advanced Tactile Imaging, Inc.
- Airtraq*
- Arthrex
- ATMOS MedizinTechnik
- BD (Bard Access, CareFusion)
- BK Medical
- Butterfly Network
- Canon Medical Systems
- Carestream
- Clarius Mobile Health
- Clarus Medical
- DWL Compumedics
- Echosens
- Esaote*
- Exact Imaging
- Fisher & Paykel
- Fujifilm (Hitachi)
- FUJIFILM SonoSite
- GE Healthcare
- Haag-Streit
- Karl Storz
- Laborie (Cogentix Medical, MMS)
- Machida Endoscope Co.
- MCube
- Medcom
- Mindray
- Neoplas Tools
- Ocular Instruments Inc
- Optim LLC
- Orlvision
- Pentax
- Philips
- Polydiagnost
- Samsung Healthcare
- SapiMed
- Siemens Healthineers
- Southern Scientific / Care Wise
- tic Medizintechnik
- SonoScape*
- Unisensor
- Verathon
- Xion Medical

*使用了Trio擦拭巾中的杀芽孢擦拭巾进行兼容性测试。



雀艾斯达®消毒液 — Trio擦拭巾系统为热敏无管腔医疗器械提供了完整的去污解决方案。得益于清洁,高水平消毒和冲洗的概念,通过简单,快速的三步即可完成去污。

微生物杀灭检测报告

	《消毒技术规范》	欧洲规范 (EN)
细菌	2.1.1.7.4	EN 13727
		EN 14561
		EN 16615
酵母菌/真菌	2.1.1.9	EN 13624
		EN 14562
		EN 16615
病毒	2.1.1.10	EN 14476
		EN 16615
分枝杆菌	2.1.1.8	EN 14348
		EN 14563
		EN 14347
芽孢	2.1.1.7.4	EN 14561/AOAC 966.04
		EN 16615
		EN 17126

雀艾斯达®消毒液—Trio擦拭巾系统 50

- 1盒可供50次使用
- 雀艾斯达®消毒液质量跟踪记录本



更多产品信息,请联系我们或登录www.tristel.com.cn获取。

