

非侵入式无管腔医疗器械的完整高水平消毒解决方案

 完整指南请参阅产品说明书。

注意事项:

- 始终遵循医院相关规范及器械制造商的使用说明。
- 操作消毒液和医疗器械前, 消毒双手并穿戴合适的个人防护装备。
- 医疗器械使用过后, 应依照医院规范立即进行初步的预清洗。
- 不要用力摩擦或弯折器械, 并注意边缘、尖端、凹陷及不同材料的连接处。
- 去污流程开始前, 从盒中取出每步骤擦拭巾各一片及亚氯酸钠泡沫剂。
- 产品到期后, 请勿使用。产品到期日及批号详见外包装盒。
- 为方便进行消毒, 可以将探头悬挂起来。
- 如发现包装破损或擦拭巾变色、破损或变干, 请勿使用。
- 必要时使用更多擦拭巾, 以达到器械表面目视清洁无污物。
- 保留柠檬酸剂包装, 用于去污流程结束后在《质量跟踪记录本》上进行登记。
- 依照当地规范合理废弃使用过的擦拭巾和手套。
- 仅供专业使用。



STEP 1: 清洗



从包装中取出雀艾斯达®预清洗擦拭巾, 在手掌中展开。

擦拭探头, 去除表面可见污渍。

根据当地规范, 丢弃使用过的擦拭巾及手套。

消毒双手, 戴上新手套。

STEP 2a + 2b: 激活



从柠檬酸剂包装袋中取出擦拭巾, 在手掌中展开。


取 1 瓶亚氯酸钠泡沫剂, 挤压 2 泵泡沫于 1 张带有柠檬酸的擦拭巾上。

折叠擦拭巾并揉搓 **15 秒**, 以产生二氧化氯。

确保擦拭巾完全被泡沫覆盖。

激活后的擦拭巾需立刻使用。

STEP 2: 高水平消毒

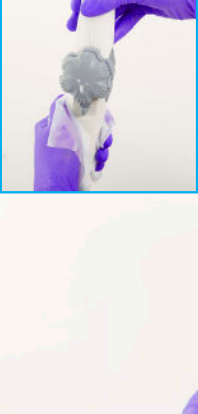

沿一个方向消毒擦拭表面, 使表面均匀覆盖泡沫。确保擦拭巾接触到所有区域。

根据当地规范, 丢弃使用过的擦拭巾。

确保最短作用时间 **30 秒**。

STEP 3: 冲洗



从包装中取出雀艾斯达®冲洗擦拭巾, 在手掌中展开。

擦拭探头, 去除多余泡沫残留。

根据当地规范, 丢弃使用过的擦拭巾。

STEP 4: 跟踪记录



将柠檬酸剂及亚氯酸钠泡沫剂包装上的产品信息记录到雀艾斯达《质量跟踪记录本》上。

