

Tristel Clean for Stella器械清洗液

专门用于Stella®5L型内镜灭菌系统

对医疗器械灭菌前的有效清洗

Tristel Clean

for Stella

器械清洗液



只有对医疗器械进行了彻底清洁，才能实现有效灭菌。

Tristel Clean for Stella 器械清洗液能够有效去除含蛋白类的有机物质，如血液等。

如后续使用 Fuse™ 内镜消毒液进行灭菌，则无需中间漂洗。

- 本品可快速高效地分解有机物质和蛋白质
- 使用安全
- 有效期二年

Tristel Clean for Stella器械清洗液带有 25mL 定量瓶口，每次使用时可轻松配给出正确剂量。

清洗的重要性

器械去污过程中，清洗和消毒一样重要。使用清洗液，可以去除污物和有机物；使用消毒剂则可有效杀灭多种有害微生物。

许多指南纷纷强调了清洗环节在器械去污过程中的重要性。若无清洗环节，器械表面的杂质会影响消毒剂的活性成分，降低消毒效果。

表面残留的有机物会阻碍消毒剂破坏微生物细胞。在污染环境下，消毒剂的消毒效果会降低，这也论证了消毒前的清洁对于有效消毒的重要性。¹

参考文献：

[1] Tristel Solutions Ltd (2016) *The Importance of Cleaning before Disinfecting*


Tristel Clean for Stella

器械清洗液使用方法

- 预清洁器械，初步去除污物。




挤压瓶身，至液面上升到定量瓶口刻度标识处，获取 25mL 器械清洗液浓缩原液。

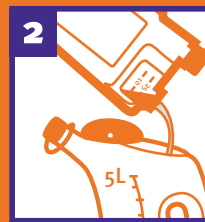


将 25mL 浓缩原液倒入装有 5L 常温自来水的水槽或 Stella 消毒水壶中。

注：请勿使用热水。

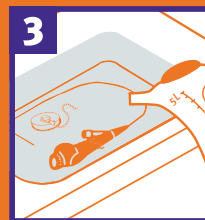

将稀释的 Tristel Clean for Stella 器械清洗液倒入水槽。开始手动清洗。

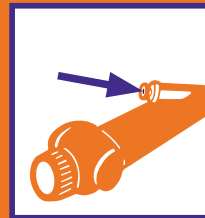

如果器械有管腔，需浸没在清洗液中充分刷洗。请根据各器械制造商的清洗指南清洗。



手动清洗时，需保证器械与清洗液接触时间不低于 5 分钟。

- 清洗步骤完成后，将器械从器械清洗液中取出，并去除多余液体。
- 将器械放入 Stella®5L 型内镜灭菌系统中，依照 Stella 屏幕提示进行后续的灭菌操作。

根据欧盟医疗器械指令 2017/745，
Tristel Clean for Stella 器械清洗液通过 CE 认证为 I 类医疗器械。

