

Tristel™ Clean for Stella

Tristel Clean for Stella 器械清洗液是一款不含酶的 清洗剂, 专为在 Stella 系统中 进行消毒前的医疗器械高效 清洗而设计。

只有对医疗器械进行彻底清洁, 才能实现有效的消毒效果。

Tristel Clean for Stella 器械清洗液能够有效去除含蛋白类的有机污染物, 如血液等。

若后续采用 Tristel Fuse for Stella 消毒液进行高水平消毒, 则无需进行中间冲洗步骤。

✔ 本品为不含酶配方, 含癸基葡糖苷及 N,N-二甲基癸烷基-N-氧化胺, 可快速并有效地分解有机物质和蛋白质

✔ 易于使用

✔ 有效期二年

Tristel Clean for Stella 器械清洗液带有 25mL 定量瓶口, 有助于在每次使用时实现准确配比。




Tristel Clean for Stella 器械清洗液使用方法

- 对器械进行预清洁, 初步去除污物。



挤压瓶身, 使液面上升至定量瓶口刻度标识处, 取用 25mL 器械清洗液浓缩原液。

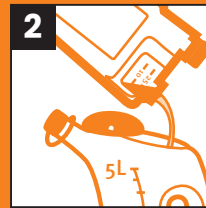


将 25mL 浓缩原液倒入装有 5L 常温自来水的水槽中 (手动清洗), 或 Stella 清洗容器中 (Stella 系统清洗)。

注: 请勿使用热水。



将已稀释的 Tristel Clean for Stella 器械清洗液倒入水槽中进行手动清洗。

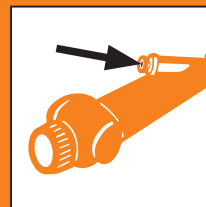

手动清洗时, 如器械带有管腔, 应在清洗液中对管腔进行充分刷洗, 并遵循器械制造商的清洗说明。



确保器械与清洗液的接触时间为 5 分钟。

- 若未使用 Stella 系统进行清洗, 请在手动清洗步骤完成后, 将器械从清洗液中取出, 并去除多余液体。
- 按照 Stella 显示屏上的提示进行操作。

*完整操作说明请参阅 Stella 使用说明书。

Tristel™

中国
雀艾斯达医疗器械(上海)有限公司
电话 +86 (21) 8016 2555
邮箱 888@tristel.com
网站 www.tristel.com.cn



立即扫码
获取更多资讯

For Tristel patent information please visit:
<http://www.our-patents.info/tristel>
Copyright © Tristel Solutions Limited
Mkt-Fac-1059-4 - 13/MAY/2026