





# Stella®5L型内镜灭菌系统操作步骤


## Stella®5L内镜灭菌系统 (配套Fuse™内镜消毒液使用)

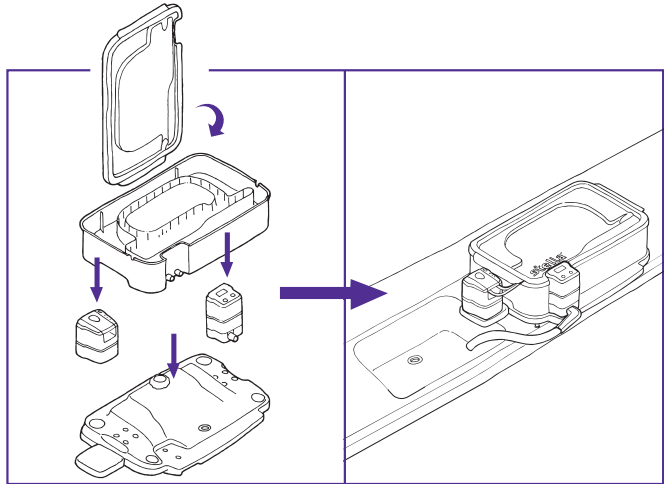


**步骤 1**  
在靠近水槽的位置放置 Stella 底座，调试底座上的水平仪确保已放置平衡，然后将 IQ、Pulse、载体消毒盒装配在底座上。

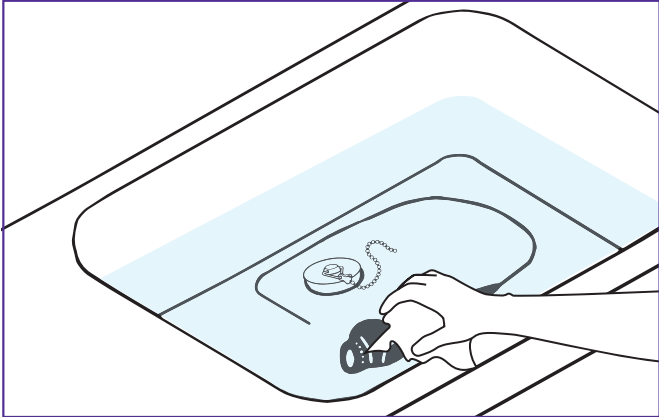


**步骤 2**  
进入消毒灭菌之前，按照要求需要彻底地预清洗内镜及器械。确保预清洗液有效通过管腔。

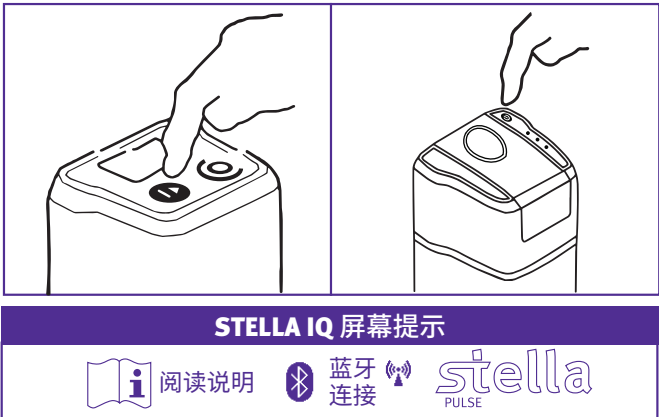


**步骤 3**  
按下图中 IQ 及 Pulse 上的电源/开始按钮，直到听到启动声音。设备将自动搜索蓝牙进行配对。依照Stella IQ上的提示进行操作。

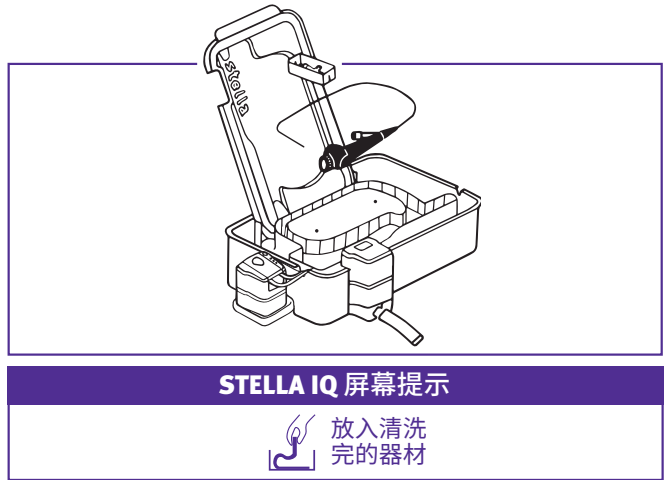


**步骤 4**  
将预清洗过的内镜或器械及小零件盒放入载体消毒盒内舱。  
注意：如有不能浸没到液体中的导线或部件，应从消毒盒右侧引出至 Stella 外；如无部件需引出，则用橡胶垫圈将右侧切口封闭。

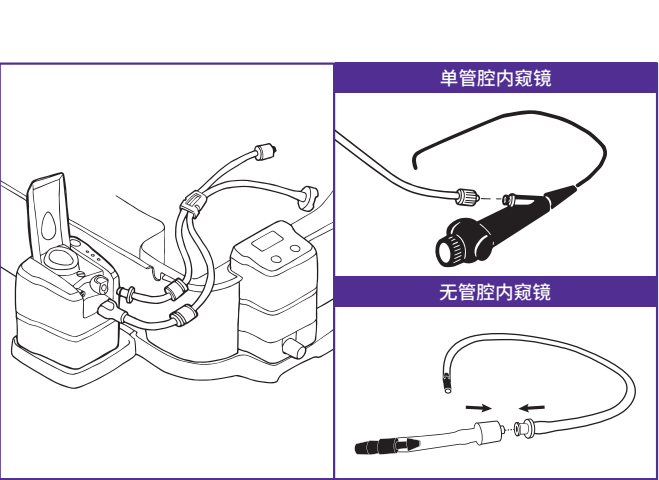


**步骤 5**  
将连接管集线扣挂到消毒盒左侧切口上，以确保消毒液吸收/过滤口放置在舱内。  
**单管腔内窥镜**：将连接管接到 Pulse 上，然后将另一端的鲁尔接口与器械管腔对接。  
**无管腔内窥镜**：将连接管接到 Pulse 上，然后将另一端的鲁尔接口与替代管路对接。

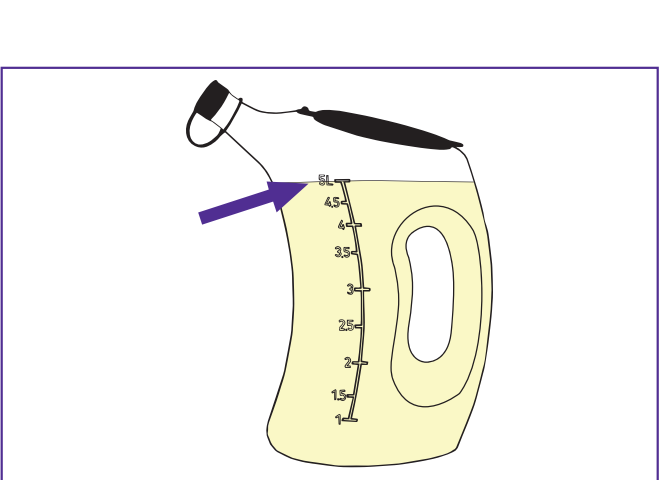


**步骤 6**  
用常温水制备 5 升 Fuse™内镜消毒液。仔细阅读消毒液相关使用说明。  
注意：严禁使用热水做为消毒液的溶剂。

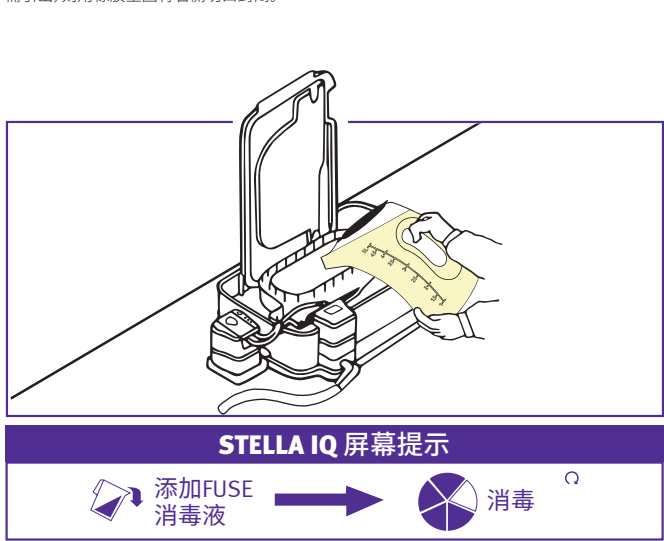


**步骤 7**  
将 5 升 Fuse™内镜消毒液倒入消毒盒内舱直到溢出。确保倒完全部 5 升消毒液。设备将发出一声哔声，确认 5 分钟消毒灭菌循环启动。  
注意：如果 Stella IQ 启动后 10 分钟内消毒液没有注入载体盒，Stella IQ 将自动停止灭菌循环。

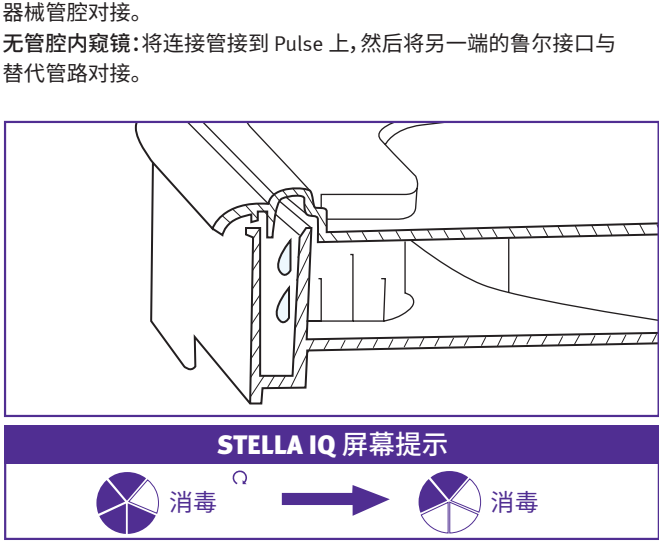


**步骤 8**  
盖上载体消毒盒盖。这个动作会挤压器械内舱使更多消毒液从侧壁溢出舱外，将消毒舱完全密封。Stella IQ 会自动倒计时 5 分钟显示消毒环节进度，并指引 Pulse 将消毒液以脉冲方式输送通过器械管腔 1 分钟。

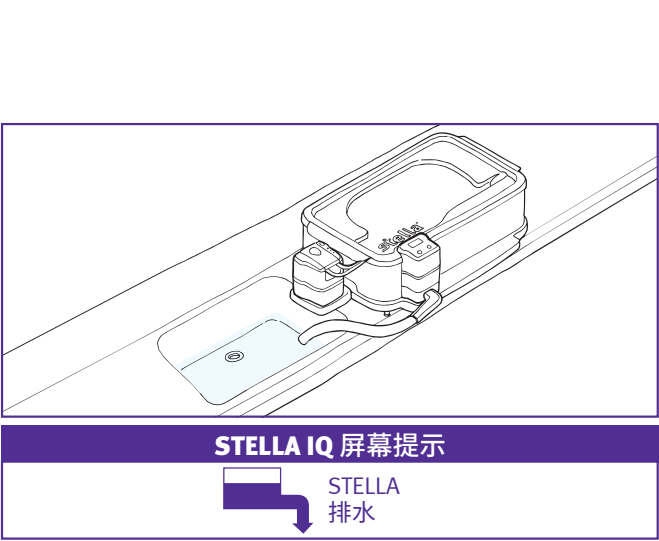

**步骤 9**  
5 分钟后 Stella 自动排出舱内液体。Pulse 脉冲泵会将空气输送到内镜管腔，去除残留消毒液。载体消毒盒排空时会有一个提示音，说明消毒灭菌循环已完成。

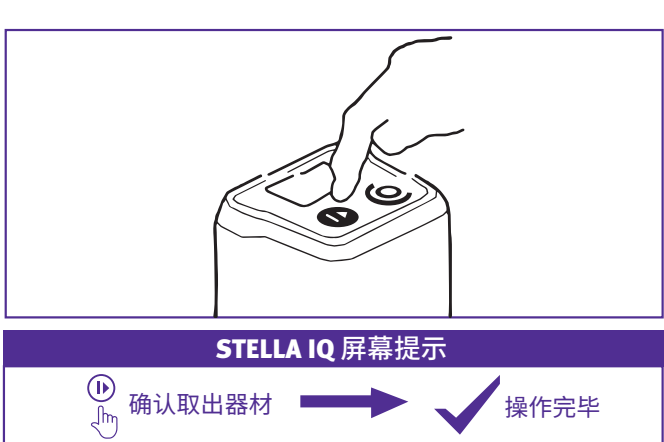

**步骤 10**  
按下 IQ 上的确认按钮，确认器械已取出，本次消毒灭菌循环已完成。IQ 将显示本次消毒的跟踪验证代码。

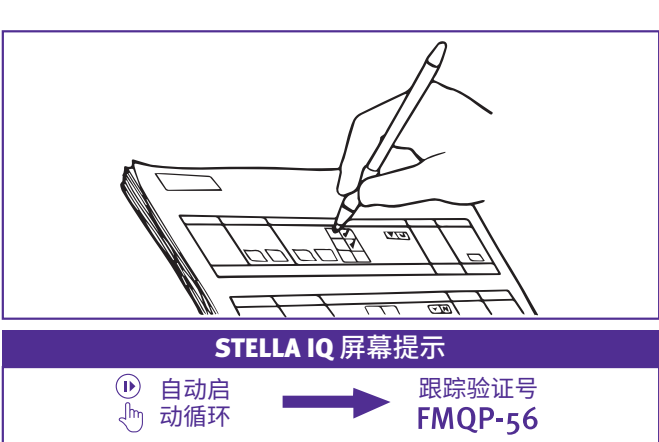

**步骤 11**  
将验证代码记录到患者病历或 Stella 质量跟踪记录本上。Stella IQ 会储存所有相关信息用于下载至电脑。再次按下开始/确认按钮，可以立即启动一个新的消毒灭菌循环。如需关闭设备，按下 IQ 上的关闭按钮。



**制造商:** Tristel Solutions Limited,  
Lynx Business Park, Cambs, UK, CB8 7NY  
T +44 (0) 1638 721500 - W www.tristel.com

**中国:** 雀艾斯达医疗器械(上海)有限公司  
上海市黄浦区淡水路277号二层203室  
T +86 (21) 8016 2555 - E 888@tristel.com

如需更多Tristel专利信息，请访问：<http://www.our-patents.info/tristel>

Copyright © Tristel Solutions -Mkt-Wal-011-3 - 20 April 2021

关注微信公众号  
获取更多信息  
并可更新培训证书

