

手工清洗操作规程


此规范根据澳大利亚和新西兰标准《AS / NZS 4187卫生服务机构可重复使用医疗及手术器械的清洗、消毒和灭菌》制定。

对于管腔器械，在使用Stella®5L型内镜对其灭菌之前应先完成以下手动清洗流程。同时也请参照器械制造商的清洗说明。

手动清洗过程所需的用具

- Tristel Clean for Stella 器械清洗液
- Tristel Duo® 擦拭巾
- 鲁尔接头注射器
- 计时器，用于清洗过程计时
- 管腔器械清洗套刷（包括管腔刷和小的表面刷）
(仅适用于单管腔内窥镜)

建议在每台器械的清洗之前进行测漏。详情参阅内镜制造商的说明。

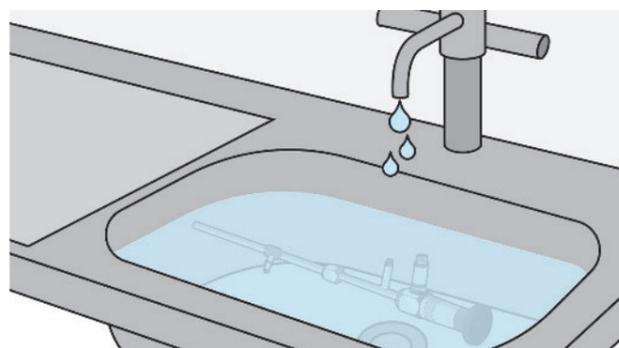


Step 1

将器械放在清洗槽中。在清洗槽中注入5升的常温自来水，以完全浸没器械。




Step 2

配制 Tristel Clean for Stella 器械清洗液，按每5升常温自来水加 25 毫升清洗液的比例稀释。
例如水槽被两份 5 升的常温自来水装满，则必须添加两份 25 毫升的器械清洗液。

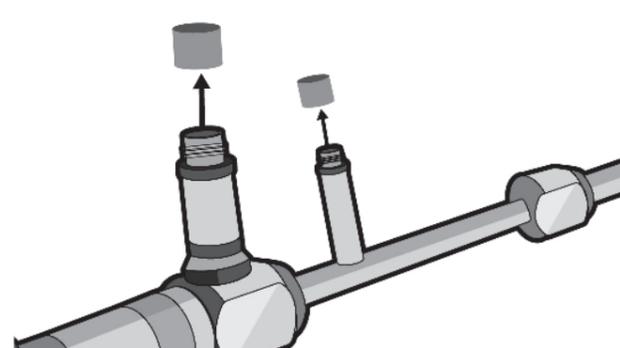

Step 3

内镜上所有可拆卸的零部件都必须拆下单独清洗。

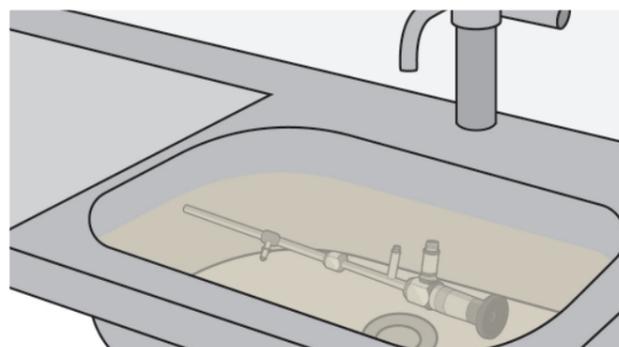


Step 4

把内镜及配件浸没在已稀释的溶液中，确保清洗过程达到所需接触时间。按照以下指示彻底刷洗并冲洗管腔。




Step 5

确保 5 分钟的接触时间。

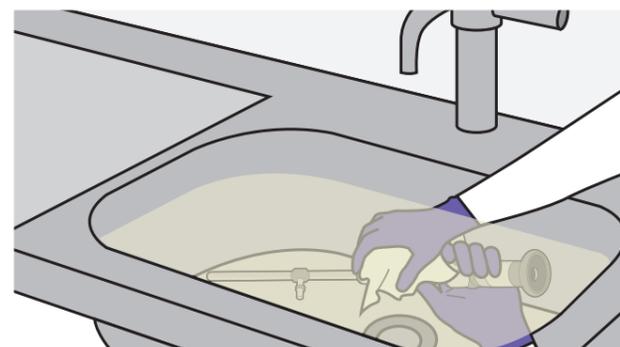


Step 6

用 Tristel Duo® 擦拭巾擦拭内镜及配件，确保内镜沾上已稀释的器械清洗液。

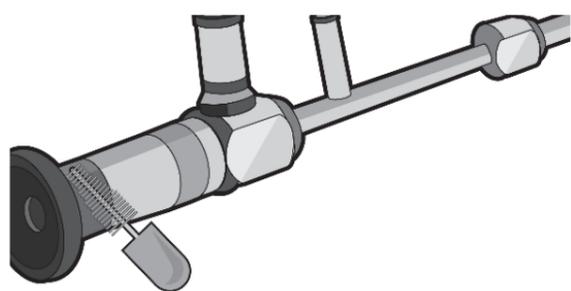

Step 1

用小型刷子刷洗内镜及配件外表的连接处和缝隙。

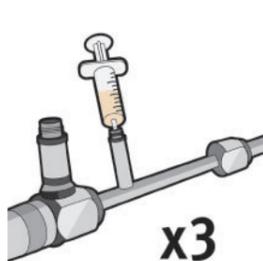

Step 1


用鲁尔接头注射器抽取 20mL 清洗液，连接到膀胱镜的管腔端口，然后冲洗。这一冲洗过程应当重复进行 3 次。

x3




Step 2

排出清洗液。

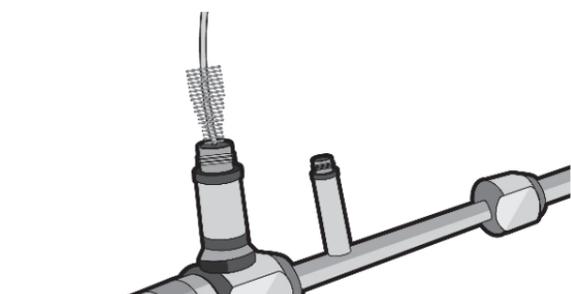

Step 2 (仅适用于单管腔内窥镜)


清洗每个内镜时使用干净的管腔刷，清洁全部工作通道，包括吸引和气/水管道。清洗时应将刷头通过工作通道，直至超出通道的末端端口。然后将刷子取出。重复此步骤 3 次，或直至清除可见污物。

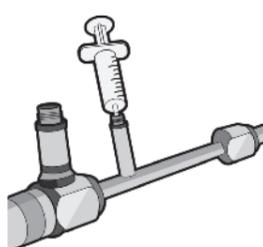

Step 3

用鲁尔接头注射器抽取 20mL 空气，连接到膀胱镜的管腔端口，去除残留的清洗液。

Stella 灭菌流程

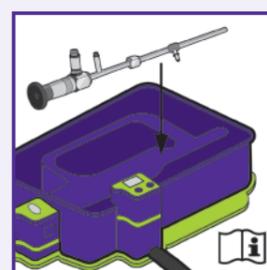

Step 1

将器械放在 Stella 载体灭菌盒中，并按照 Stella 挂图上的说明进行操作。



Step 2

带有 Pulse 的 Stella 灭菌周期需时 5 分钟。

