



JET[™]泡沫型消毒液 可杀灭芽孢的擦拭巾的制作

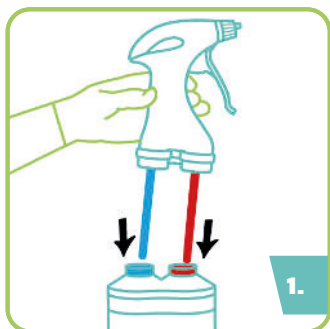

1. 组装JET产品瓶。将喷头的蓝色管置入带蓝色标记的瓶颈中,红色管置入带红色标记的瓶颈中。

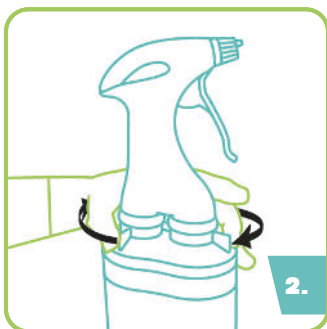

2. 拨动瓶颈处的小刮片,将喷头与瓶身牢牢固定住。




3. 转动喷嘴出口处的旋钮,对齐头部的直线。
组装完成,可供使用。



4. 直立握住后,用力挤压喷头处把手。产品可直接喷于所需表面或干燥的擦拭巾上。

注意: 挤压两剂用量可消毒的面积为50cmx20cm(即0.1m²)。

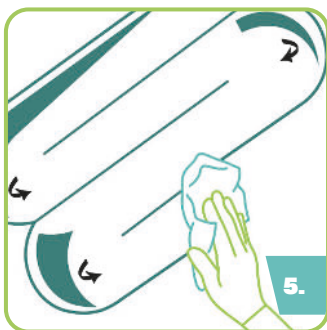

5. 擦拭,使泡沫覆盖表面。



6. 保持表面湿润1分钟以保证消毒效果。
自然晾干。

注意事项:

- 产品说明书应与产品标签,安全数据表(SDS)和器械制造商指南配合使用。
- 在处理消毒剂和医疗器械时,请消毒双手并穿戴个人防护装备。
- 如产品破损,请勿使用。
- 不可用于软金属,如黄铜或纯铜。
- 仅供专业使用。
- 空瓶不可再次使用。请根据当地规范废弃使用过的空瓶及擦拭巾。
- 请勿将本品使用在侵入性医疗器械或手术设备上。



请参阅《产品说明书》获得完整信息。

