


stella™


Stella 操作步骤

Stella 系统 (配套 Fuse™ 内镜消毒液使用)

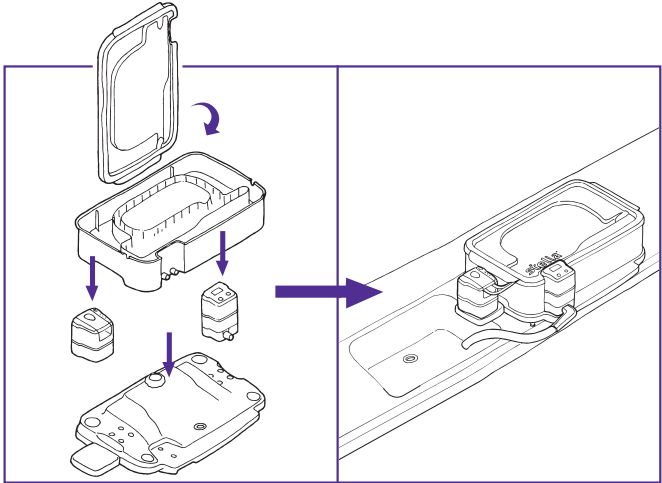


步骤 1

在靠近水槽的位置放置 Stella 平衡底座，调试平衡底座上的水平仪，确保已放置平衡，然后将 IQ、Pulse、载体消毒盒装配在平衡底座上。

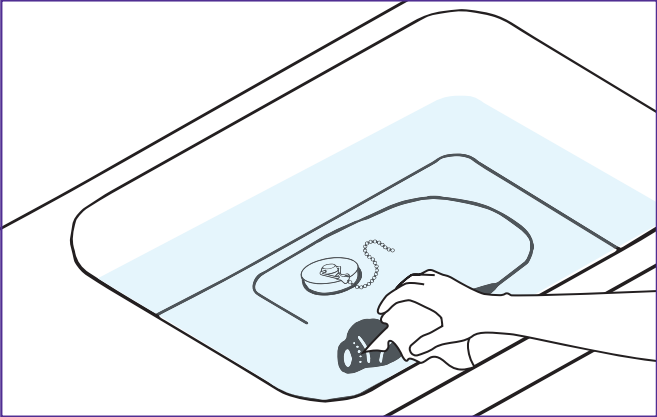


步骤 2

进入循环之前，按照要求需要彻底地预清洗内镜及器械。确保预清洗液有效通过管腔。

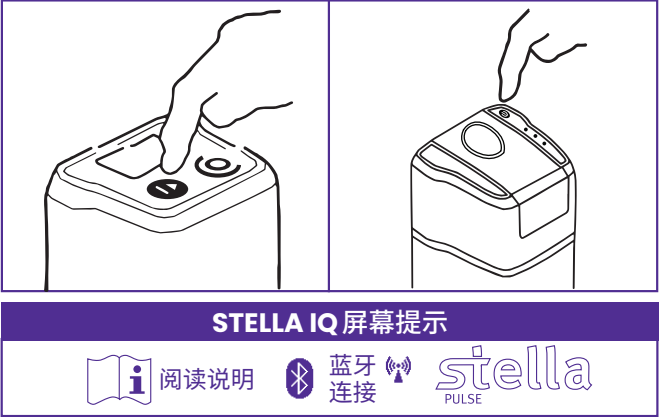

步骤 3


长按 Stella IQ (时间控制装置) 的“开始/确认”键，直至听到提示音。按住 Stella Pulse 脉冲泵“开机/关机”键，直至听到提示音。Stella IQ (时间控制装置) 会进行短暂的开机自检。Stella IQ (时间控制装置) 自动与 Stella Pulse (泵) 连接，出现蓝牙标志时表示连接成功。该标志在整个运行过程中始终显示。按 Stella IQ (时间控制装置) 的屏幕说明操作。

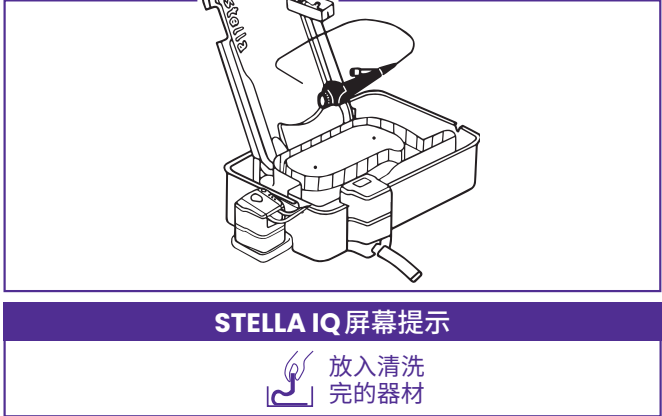

步骤 4

将预清洗过的内镜或器械及小零件盒放入基座凹槽中。

注意：所有连接管和不能浸没到液体中的导线或部件，应从消毒盒右侧引出至 Stella 外；如无部件需引出，则用橡胶垫圈将右侧切口封闭。

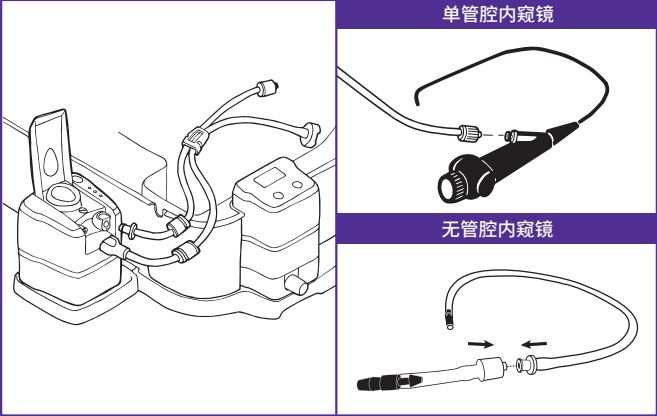


步骤 5

将连接管集线扣挂到消毒盒左侧切口上，以确保消毒液吸收/过滤口放置在内舱中。

单管腔内窥镜：将连接管接到 Pulse 上，然后将另一端的鲁尔接口与器械管腔对接。


无管腔内窥镜：将连接管接到 Pulse 上，然后将另一端的鲁尔接口与替代管路对接。

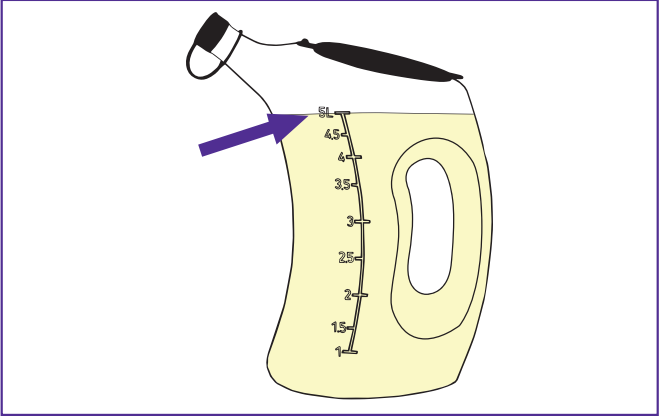

步骤 6

用常温水制备 5 升 Fuse™ 内镜消毒液。仔细阅读消毒液相关使用说明。


注意：严禁使用热水做为消毒液的溶剂。

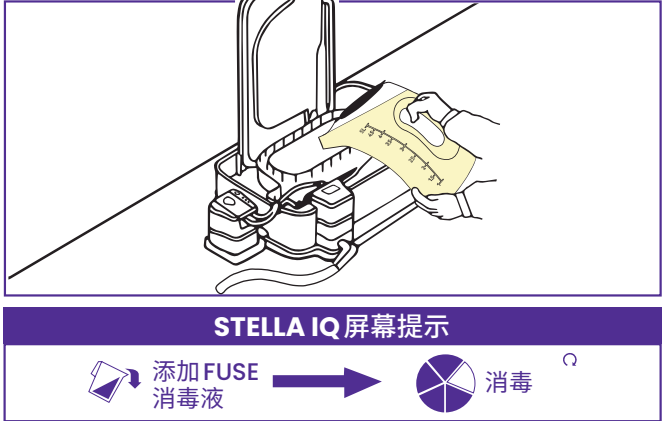

步骤 7

按时间控制装置 IQ 的提示，将 5 升 Fuse™ 内镜消毒液倒入基座凹槽。建议将盛液壶置于基座外壁 Stella IQ (时间控制装置) 右侧。用一只手托住壶底，将壶缓慢倾斜。须倒入全部 5 升消毒液。消毒液将沿凹槽边缘溢流到基座的溢水隔中，并立即排出。


注意：如果 5 分钟内未向 Stella 中加入 Fuse™ 内镜消毒液，Stella IQ (时间控制装置) 将自动中止本次流程。

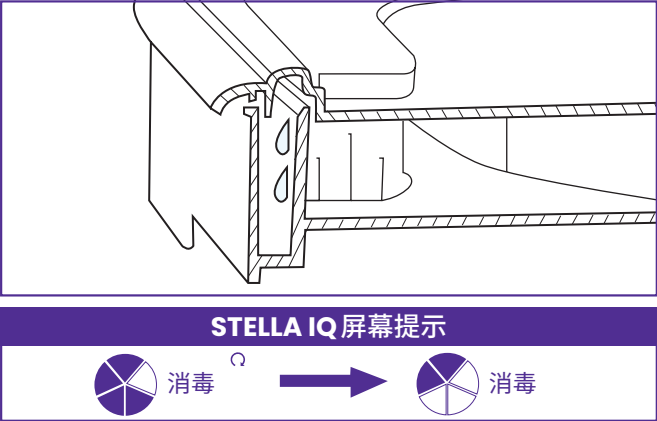

步骤 8


将盖子平放于基座上，并盖紧。盖上盖子时会有更多的消毒液流入溢水隔。首先，Pulse 脉冲泵将消毒液泵送至器械整个腔道，耗时 90 秒。接着不再泵送消毒液，等待 5 分钟的作用时间。

时间控制装置 IQ 将显示剩余的作用时间。最后，Pulse 脉冲泵会再次将消毒液泵送至器械整个腔道。

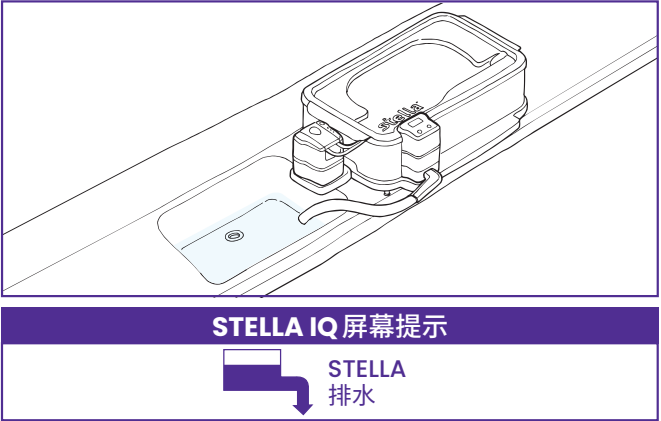


步骤 9

作用时间结束后，Stella 会自动排出消毒液。Pulse 脉冲泵会将空气输送到内镜管腔，去除残留消毒液。载体消毒盒排空时会有一个提示音，说明循环已完成。

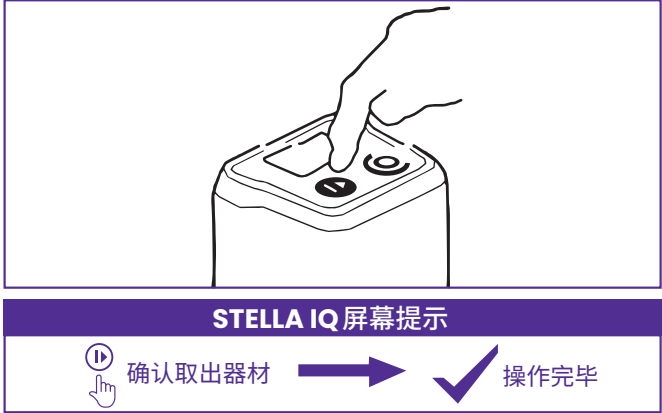

步骤 10

按“开始/确认”键，确认已取出器械，Stella IQ (时间控制装置) 将显示跟踪验证码。

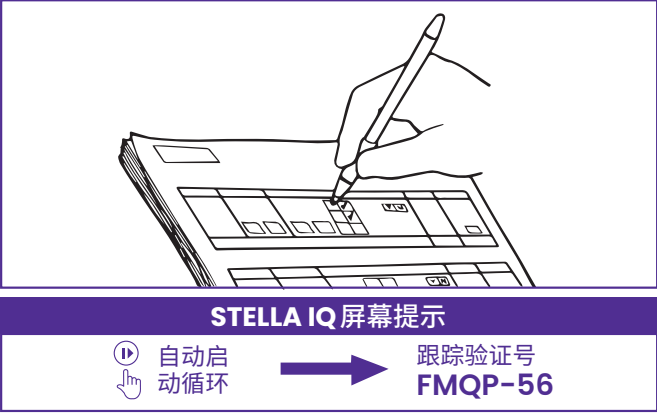

步骤 11

将验证码记录到患者病历或 Stella《质量跟踪记录本》上。Stella IQ 会 储存所有相关信息用于下载至电脑。再次按下开始/确认按钮，可以立即启动一个新的循环。

需要关闭 Stella IQ (时间控制装置) 时，请按“关机”键。

