


stella™

手工清洗操作规程


此规范根据澳大利亚和新西兰标准《AS/NZS 4187 卫生服务机构可重复使用医疗及手术器械的清洗、消毒和灭菌》制定。

对于管腔器械，在使用 Stella 对其消毒或灭菌之前应先完成以下手动清洗流程。同时也请参照器械制造商的清洗说明。

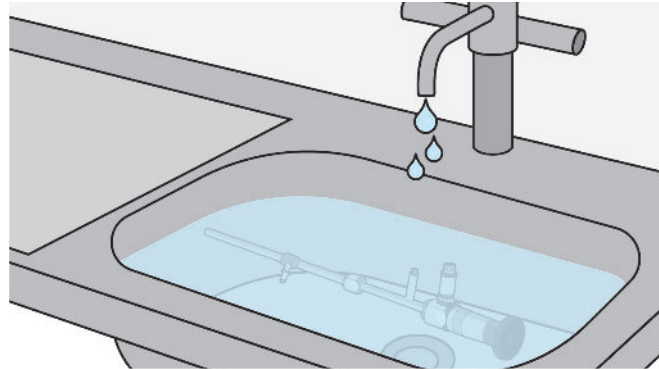


步骤 1

将器械放在清洗槽中。在清洗槽中注入 5 升的常温自来水，以完全浸没器械。

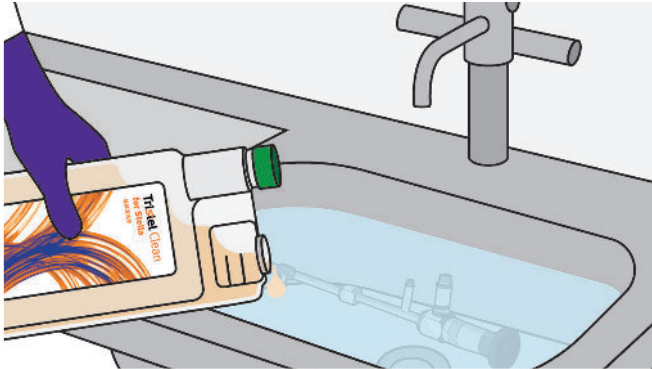


步骤 2

配制 Tristel Clean for Stella 器械清洗液，按每 5 升常温自来水加 25 毫升清洗液的比例稀释。例如水槽被两份 5 升的常温自来水装满，则必须添加两份 25 毫升的器械清洗液。

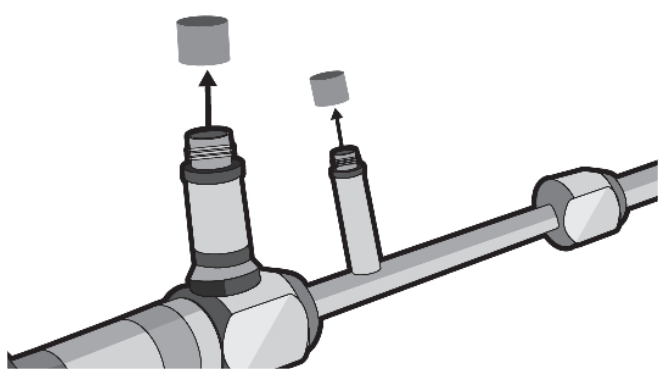

步骤 3

内镜上所有可拆卸的零部件都必须拆下单独清洗。

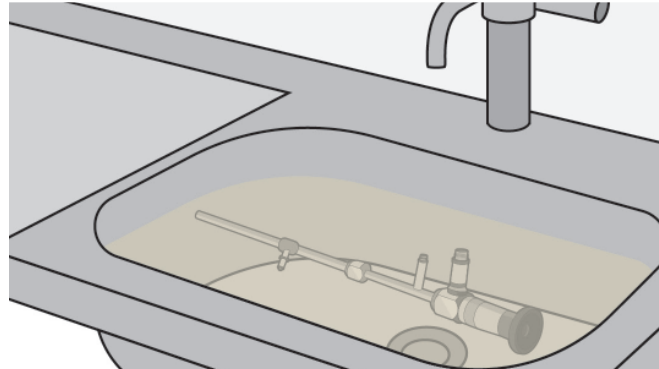

步骤 4

把内镜及配件浸没在已稀释的溶液中，确保清洗过程达到所需作用时间。按照以下指示彻底刷洗并冲洗管腔。




步骤 5

确保 5 分钟的作用时间。




步骤 6

用 Tristel Duo® 擦拭巾擦拭内镜及配件，确保内镜沾上已稀释的器械清洗液。

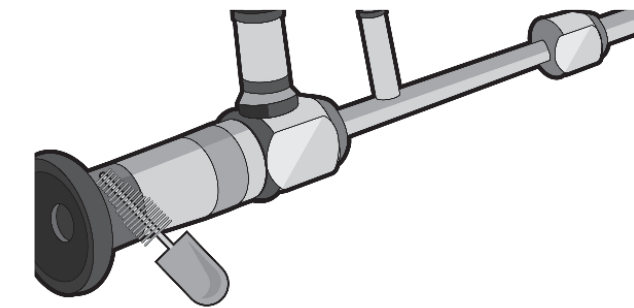


步骤 1

用小型刷子刷洗内镜及配件外表的连接处和缝隙。

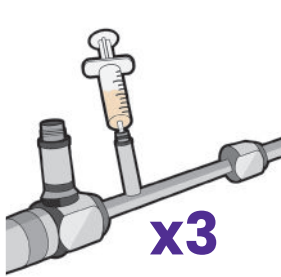


步骤 1

用鲁尔接头注射器抽取 20mL 清洗液，连接到膀胱镜的管腔端口，然后冲洗。这一冲洗过程应当重复进行 3 次。

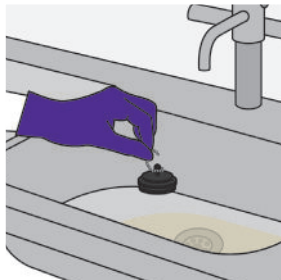


步骤 2

排出清洗液。

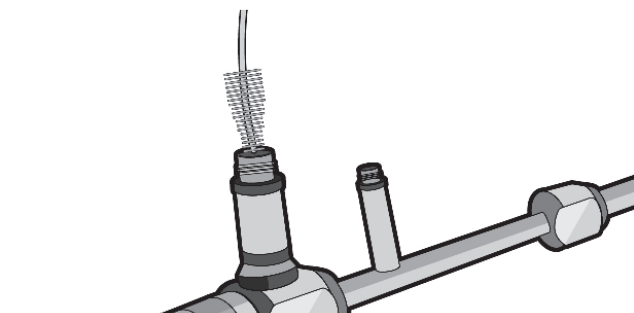

步骤 2 (仅适用于单管腔内镜)


清洗每个内镜时使用干净的管腔刷，清洁全部工作通道，包括吸引和气/水管道。清洗时应将刷头通过工作通道，直至超出通道的末端端口。然后将刷子取出。重复此步骤 3 次，或直至清除可见污物。

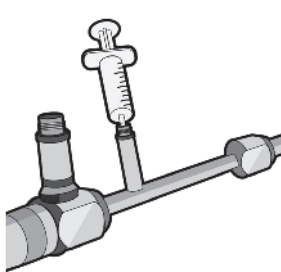

步骤 3

用鲁尔接头注射器抽取 20mL 空气，连接到膀胱镜的管腔端口，去除残留的清洗液。

Stella 操作流程

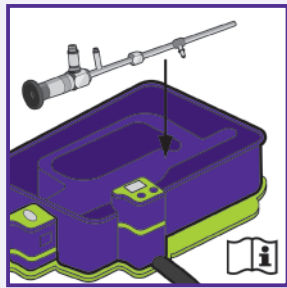

步骤 1

将器械放在 Stella 中，并按照 Stella 挂图上的说明进行操作。



步骤 2

Stella 作用时间 5 分钟。

