

Tristel Duo™ ORL

Tristel Duo® 泡沫型消毒液


适用于软式鼻内镜



注意事项：

- 如发现瓶身破损，请勿使用。
- 使用前消毒双手并穿戴合适的个人防护装备。
- 第一次使用时，按压二到四次以启动泵头。
- 仅限使用于预清洗过后的器械。
- 仅供专业使用。
- 本挂图应与说明书、产品标签、安全数据表 (SDS) 及器械制造商指南配合使用。


步骤 1

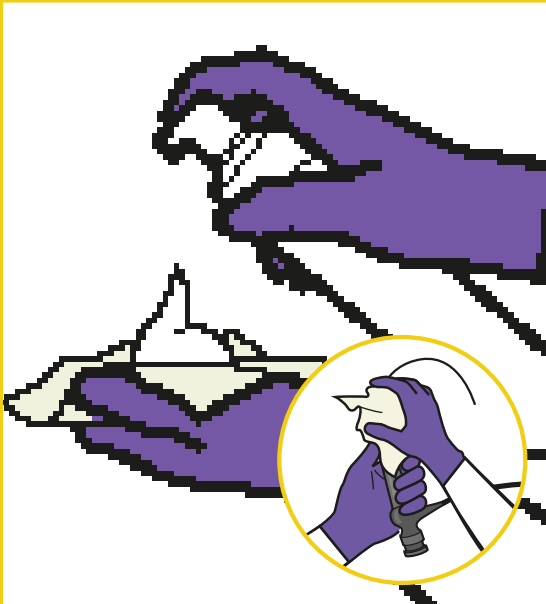

移去器械保护套，挤压 Tristel Clean 清洁泡沫于干擦拭巾 (推荐使用配套擦拭巾 Tristel Duo® 擦拭巾) 上进行清洁。

注意：清洗步骤请参考 Tristel Clean 清洁泡沫的产品说明书。

步骤 2

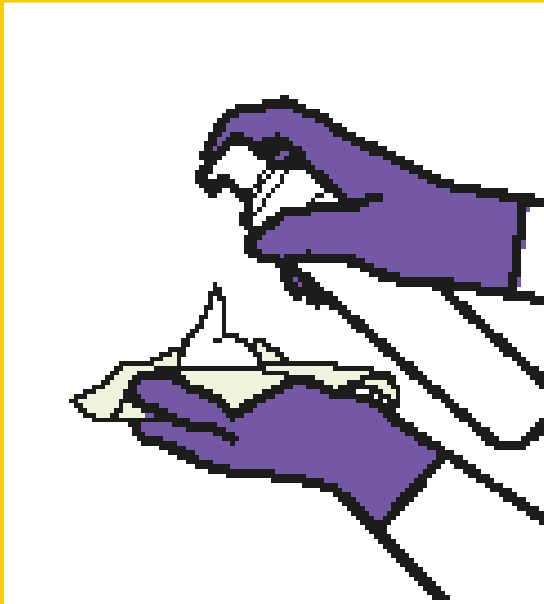

按压 2 泵消毒液至干燥的擦拭巾上 (推荐使用配套擦拭巾 Tristel Duo® 擦拭巾)。

步骤 3



用擦拭巾将消毒泡沫均匀地涂抹在器械表面，并确保覆盖所有区域。不需要反复擦拭，以避免擦拭巾掉屑。

注意：根据当地规范合理废弃使用过的擦拭巾。不可浸洗。不可重复使用。

步骤 4




使用 Tristel Duo® 泡沫型消毒液对可能与探头接触的表面 (例如支架，电缆和连接器) 进行高水平消毒。

步骤 5



擦拭后静置器械，作用时间至少为 30 秒。

步骤 6

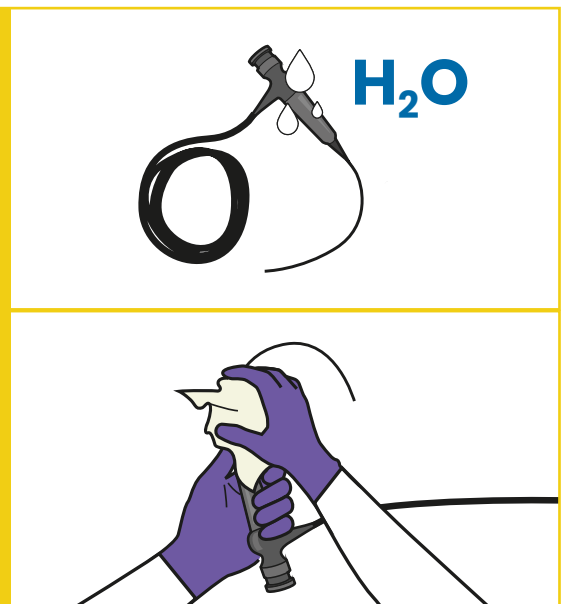

使用合规的水源冲洗器械。

注意：消毒后注意按照医院规范正确放置器械，以免损坏或再污染。

Tristel™

制造商: Tristel Solutions Limited, Unit 1b Lynx Business Park,
Fordham Road, Snailwell, Cambridgeshire, CB8 7NY, UK
T +44 (0) 1638 721500 - E mail@tristel.com - W www.tristel.com

如需更多 Tristel 专利信息，请访问：<http://www.our-patents.info/tristel>
Copyright © Tristel Solutions - Mkt-Wal-1296-2 - 11/APR/2024

在华责任单位: 雀艾斯达医疗器械 (上海) 有限公司
上海市黄浦区淡水路 277 号二层 203 室
T +86 (21) 8016 2555 - E 888@tristel.com



关注微信公众号
获取更多信息



登录微信小程序
完成产品培训