

Tristel Duo™ OPH

雀艾斯达®眼科器械消毒液

可重复使用眼压计棱镜
高水平消毒解决方案

注意事项：

- 如发现瓶身破损，请勿使用。
- 使用前请消毒双手并穿戴合适的个人防护装备。
- 第一次使用时，请按压二到四次以启动泵头。
- 如果器械表面有明显污垢，请遵循医院规范进行预清洗。
- 供专业使用。
- 本挂图应与说明书、产品标签、安全数据表(SDS)及器械制造商指南配合使用。

步骤 1



按压2泵雀艾斯达®眼科器械消毒液至干燥的擦拭巾上(推荐配套使用Tristel Duo®擦拭巾)或直接在眼压计棱镜上。

步骤 2



用擦拭巾将消毒泡沫均匀地涂抹在眼压计棱镜表面,并确保覆盖所有区域。无需反复擦拭棱镜,以避免擦拭巾掉屑。

注意：依照当地法规合理废弃使用过的擦拭巾。不可浸洗。不可重复使用。

步骤 3



擦拭后静置棱镜使其自然干燥,保证最短作用时间**1分钟**。

步骤 4



用合规的水源冲洗棱镜。

注意：请遵循医院相关规范,正确存放器械,避免造成损伤或再次污染。

Tristel™ | 雀艾斯达™

制造商: Tristel Solutions Limited
Lynx Business Park, Cambs, UK, CB8 7NY
T +44 (0) 1638 721500 - W www.tristel.com

在华责任单位: 雀艾斯达医疗器械(上海)有限公司
上海市黄浦区淡水路277号二层203室
电话 +86 (21) 8016 2555 - 邮箱 888@tristel.com

如需更多Tristel专利信息,请访问:<http://www.our-patents.info/tristel>

关注微信公众号
获取更多信息
并可更新培训证书

