



Tristel Duo® 泡沫型消毒液

注意事项:

如发现瓶身破损, 请勿使用。


使用前消毒双手并穿戴合适的个人防护装备。

第一次使用时, 按压二到四次以启动泵头。

仅限使用于预清洗过后的器械。


仅供专业使用。

本挂图应与说明书、产品标签、安全数据表 (SDS) 及器械制造商指南配合使用。

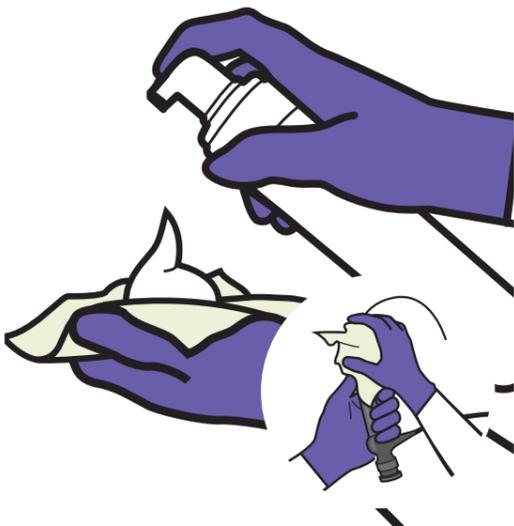

移去器械保护套, 挤压 Tristel Clean 清洁泡沫于干擦拭巾 (推荐使用配套擦拭巾 Tristel Duo® 擦拭巾) 上进行清洁。

注意: 清洗步骤请参考 Tristel Clean 清洁泡沫的产品说明书。

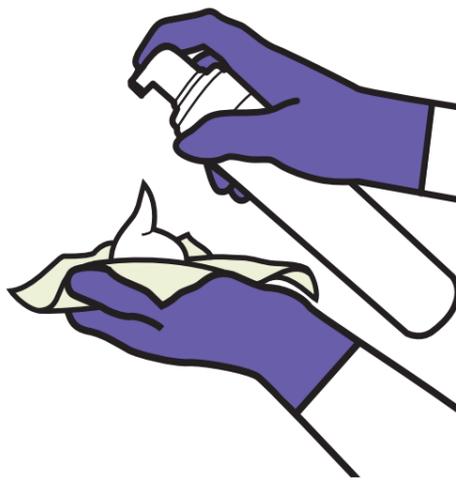


按压 2 泵消毒液至干燥的擦拭巾上 (推荐使用配套擦拭巾 Tristel Duo® 擦拭巾)。



用擦拭巾将消毒泡沫均匀地涂抹在器械表面, 并确保覆盖所有区域。不需要反复擦拭, 以避免擦拭巾掉屑。

注意: 根据当地规范合理废弃使用过的擦拭巾。不可浸洗。不可重复使用。

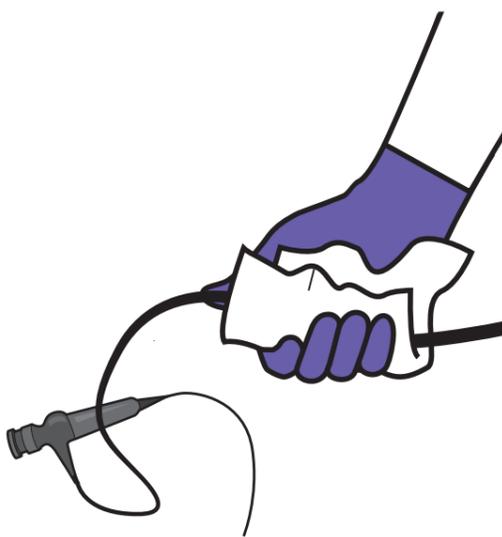

使用 Tristel Duo® 泡沫型消毒液对可能与探头接触的表面 (例如支架, 电缆和连接器) 进行高水平消毒。

30
秒

擦拭后静置器械, 作用时间至少为 30 秒。



使用合规的水源冲洗器械。

注意: 消毒后注意按照医院规范正确放置器械, 以免损坏或再污染。

