

Tristel DuoTM

ULT

雀艾斯达®超声探头消毒液

腔内超声探头
高水平消毒解决方案

注意事项：

- 如发现瓶身破损，请勿使用。
- 使用前消毒双手并穿戴合适的个人防护装备。
- 第一次使用时，按压二到四次以启动泵头。
- 清除表面残留的耦合剂后再使用本品进行消毒。
- 如果器械表面有明显污垢，遵循医院规范进行预清洗。
- 仅供专业使用。
- 本挂图应与说明书、产品标签、安全数据表(SDS)及器械制造商指南配合使用。

步骤 1



按压2泵雀艾斯达®超声探头消毒液至干燥的擦拭巾上(推荐使用配套使用 Tristel Duo®擦拭巾)。


步骤 2



用擦拭巾将消毒泡沫均匀地涂抹在超声探头表面,并确保其覆盖探头所有区域。无需反复擦拭探头,以避免擦拭巾掉屑。必要时可使用棉签将消毒泡沫涂抹在探头缝隙处。

注意:依照当地政策合理废弃使用过的擦拭巾,不可浸洗。不可重复使用。

步骤 3

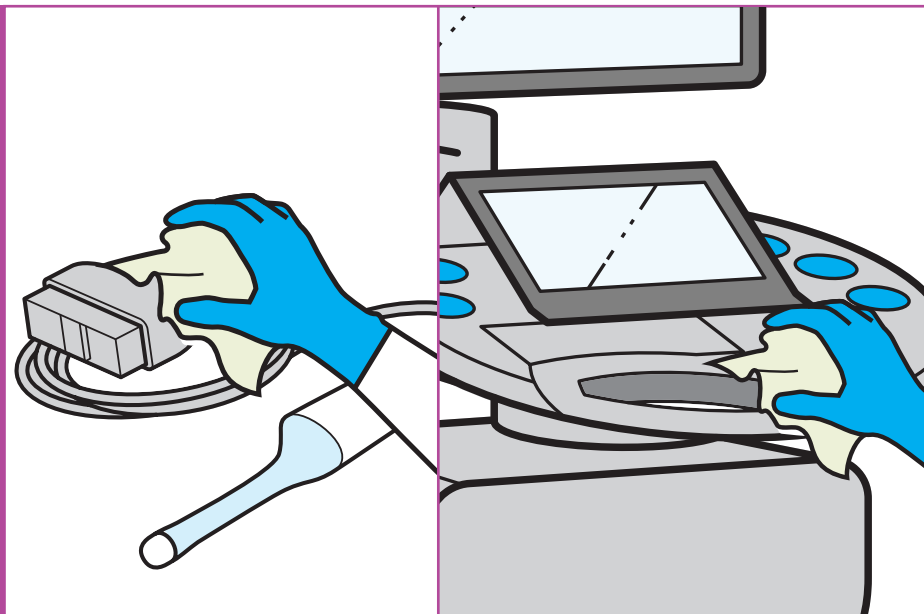

用雀艾斯达®超声探头消毒液高水平消毒可能与探头产生接触的医疗表面,如支架、缆线、插头等。

步骤 4



擦拭后静置探头使其自然干燥,保证最短作用时间1分钟。

注意:遵循医院规范存放器械,避免造成损伤或再次污染。

TristelTM

制造商: Tristel Solutions Limited, Lynx Business Park, Cambs, UK, CB8 7NY
T +44 (0) 1638 721500 - E mail@tristel.com - W www.tristel.com
如需更多Tristel专利信息,请访问:<http://www.our-patents.info/tristel>
Copyright © Tristel Solutions - Mkt-Wal-772-4 - 11 May 2021

在华责任单位: 雀艾斯达医疗器械(上海)有限公司
上海市黄浦区淡水路277号二层203室
T +86 (21) 8016 2555 - E 888@tristel.com

关注微信公众号
获取更多信息
并可更新培训证书

